

Pasocare Med, plaster opatrunkowy, jałowy, 10 cm x 20 cm, 1 sztuka



Cena: 4,55 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PASO
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Jałowy plaster opatrunkowy **Pasocare Med** 10 cm x 20 cm jest przeznaczony do tamowania krwawienia z drobnych ran i otarć. Zapewnia skuteczną barierę mechaniczną, chroniąc ranę przed zewnętrznymi czynnikami oraz przedostawaniem się brudu i innych ciał obcych. Doskonale sprawdza się przy ranach o niewielkim wysięku.

Zastosowanie

- Opatrywanie oraz ochrona drobnych ran i zadrapań.
- Absorbowanie niewielkich wysięków i ochrona przed zakażeniem rany.

Sposób użycia

- Oczyszczyć i zdezynfekować ranę.
- Otworzyć opakowanie i wyjąć plaster.
- Zdejmij folię ochronną ze strony przylepnej plastra.
- Zaaplikuj plaster tak, aby opatrunek zakrywał w całości uszkodzony obszar skóry.
- Używaj do czasu zagojenia rany.
- Wymieniaj plaster na nowy po przesiągnięciu opatrunku lub według zaleceń lekarza, jednak nie później niż po upływie 24 h od chwili założenia.

Właściwości

- Wymiary 10 cm x 20 cm,
- Jałowy,



- Chłonny,
- Oddychający,
- Delikatny dla skóry podczas odklejania.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne wskazówki

- Przed użyciem sprawdź stan opakowania – nie używaj, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
- Stosuj niezwłocznie po otwarciu.
- Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem.
- Nie sterylizować повторно.
- Po użyciu wyrób należy traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia.

Producent

Paso-Trading Sp. z o.o.
ul. Lutomska 48
95-200 Pabianice