

Pasocare Plaster włókninowy z opatrunkiem soft plus hipoalergiczny, 1 mx8 cm

Cena: 16,23 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Plastry
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Plaster wykonany z miękkiego materiału, posiada wysokochłonny nieprzywierający opatrunek.

Sposób użycia

1. Oczyszczyć i osuszyć ranę.
2. Wyjąć plaster z opakowania bezpośredniego.
3. Odetnij odpowiedni odcinek plastra, dopasowując go do wielkości rany.
4. Naklej plaster na skórę, kierując opatrunek bezpośrednio na ranę.
5. W celu usunięcia plastra, chwyć za jego krawędź i pociągnij wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia.
6. Zmieniaj plaster codziennie.

Przeciwwskazania

Nie stosować na rany silnie sączące.

Dodatkowe informacje

- Wyroby medyczne podlegają zwrotom wyłącznie z powodu wady jakościowej lub zostały niewłaściwie wydane.
- To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
- Produkt zawiera instrukcję w języku polskim.
- Wyrób oznaczony znakiem CE.

Producent

PASO-TRADING



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943