

Peha-soft nitrile fino, rękawice nitrylowe, niejałowe, niepuddrowane, niebieskie, rozmiar S, 10 sztuk

Cena: 5,64 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 sztuk
Postać	Rękawiczki
Producent	HARTMANN PAUL A.G.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Rękawice diagnostyczne **Peha-soft nitrile fino S** to jednorazowe, bezlateksowe rękawice wykonane z bardzo miękkiego materiału o niebieskim kolorze. Zalecane są szczególnie dla osób, które mają alergię na lateks lub reagują nadwrażliwie na pudrowane rękawice. Zapewniają ochronę przed patogenami oraz kontakt z różnymi związkami chemicznymi, takimi jak środki dezynfekcyjne i cytostatyki. Rękawice te są również bezpieczne w kontakcie z żywnością.

Składniki

Nitryl 100%.

Zastosowanie

- Niesterylny środek ochrony osobistej przeznaczony do minimalizowania zagrożenia podczas badań lekarskich i diagnostycznych, czynności terapeutycznych oraz prac z materiałem septycznym, w trakcie których nie występuje ryzyko uszkodzenia skóry.
- Ochrona dłoni przy pracy ze związkami chemicznymi, w tym środkami dezynfekcyjnymi i cytostatykami.
- Odpowiednie do zabezpieczenia dłoni w kontakcie z żywnością.

Sposób użycia

- Przed założeniem sprawdzić, czy rękawica nie jest uszkodzona lub zabrudzona.
- Nakładać na dokładnie osuszone ręce.
- Wyciągnąć jedną rękawicę unikając dotykania opakowania i nałożyć na dłoń trzymając za górną część mankietu
- Czynność powtórzyć z drugą ręką.
- Po użyciu ściągnąć poprzez zrolowanie mankietu do wnętrza.
- Wyrzucić postępując zgodnie z wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami



Właściwości

- Wyjątkowo miękki materiał,
- Bardzo elastyczny i odporny na rozdarcia,
- Doskonale dopasowuje się do kształtu dłoni,
- Bez pudru,
- Nie zawierają lateksu,
- Uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie,
- Teksturowana powierzchnia palców,
- Wysoka wrażliwość dotykowa,
- Specjalna powłoka polimerowa wewnątrz,
- Kolor: niebieski,
- Rozmiar: S.

Ważne wskazówki

- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 5-25°C.
- Chronić przed oddziaływaniem światła słonecznego i fluorescencyjnego.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła.
- Wyrób medyczny jednorazowego użytku – należy używać min. 1 pary rękawic do jednego pacjenta i jednej procedury.
- W przypadku mechanicznego uszkodzenia rękawicy należy ją niezwłocznie wymienić na nową.
- Po użyciu utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Jakość produktu nie jest zagwarantowana w przypadku uszkodzenia opakowania.

Producent

Paul Hartmann AG
Paul Hartmann Straße 12
89522 Heidenheim, Germany