

Perfect plast, plaster przeciwbólowy z wyciągiem z arniki, 9 cm x 14 cm, 50 sztuk



Cena: 142,46 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 sztuk
Postać	Plastry
Producent	EURUS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Rozgrzewające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Plastry przeciwbólowe z arniką marki **Perfect Plast** do jednorazowego wyrobu medycznego przeznaczonego dla dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia. Zawiera zawartość wyciągu z arniki górskiej, czarciego pazura oraz kory wierzby, produkt zmniejszający miejscowy ból, łagodzący dolegliwości i przynoszący ulgę mięśniom i/lub stawom. Można go używać przez 24 godziny i nadaje się do przycinania.

Skład

Acrylates Copolymer, Glycerin, Warming Agent (vanilia extract), Haroagophytum Procumbens, Arnica Montana Extract, Camphor, Boswellia Serrata Extract, Polysorbate 60, Salix Alba Bark Extract.

Sposób użycia

- Przed aplikacją należy umyć i osuszyć fragment skóry na który zamierza się nakleić plaster.
- Zdjąć warstwę ochronną.

- w celu uzyskania dodatkowego efektu rozgrzania należy zwilżyć plaster ciepłą wodą po stronie klejącej.

- Nakleić plaster na skórę.

Ostrzeżenia

- Przed użyciem należy zapoznać się ze sposobem użycia zamieszczonym na opakowaniu.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować na wrażliwą, podrażnioną lub uszkodzoną skórę.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Nie stosować u osób poniżej 16 lat a także kobiet w ciąży i karmiących.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C.

Producent

EURUS Sp. z o.o.
Ignatki 40/1
16-001 Kleosin