

Plastry Compeed, na odciski nawilżające, 6 sztuk



Cena: 36,29 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	6 sztuk
Postać	Plastry
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odciski
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Plastry Compeed na odciski nawilżające to wyrób medyczny, który jest odpowiedni do stosowania na wszystkie rodzaje odcisków.

Działanie

Produkt przynosi długotrwałą ulgę poprzez zmniejszenie tarcia oraz nacisku. Optymalne, wilgotne środowisko tworzące się pod powierzchnią plastra sprzyja szybszemu usuwaniu odcisku. Dodatek wazeliny umożliwia lepsze nawilżenie, dzięki czemu plastry sprawdzą się nawet w przypadku dojrzałych odcisków. Wodoodporna powłoka zapobiega przedostawaniu się drobnoustrojów. Plaster utrzymuje się na miejscu nawet przez kilka dni.

Skład

Plaster hydrokoloidowy.
Dodatkowo zawiera wazelinę.

Przeznaczenie

Wyrób przeznaczony dla osób dorosłych. Do stosowania na każdy rodzaj odcisków, nawet na odciski twarde i bolesne.

Sposób użycia

- Przed zastosowaniem dokładnie umyj oraz osusz skórę. Upewnij się, czy skóra dotknięta odciskiem nie jest tłusta od kremu bądź oliwki.
- Usuń papierową warstwę plastra. Nie dotykaj warstwy samoprzylepnej.
- Nałóż plaster mocno na docelowe miejsce, tak aby krążek nawilżający był pośrodku, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry.
- Noś plaster aż do momentu, w którym sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni.
- W razie potrzeby zastosuj nowy plaster. Zaleca się stosowanie plastrów Compeed do czasu, aż skóra stanie się wyleczona.

Ostrzeżenia

- Osoby chore na cukrzycę przed użyciem powinny zasięgnąć porady lekarza.
- Nie należy stosować na zainfekowane rany.
- Nie wolno stosować ponownie tego samego plastra (może to spowodować infekcję).
- Nigdy nie przecinaj plastrów Compeed.
- Ewentualne ślady po plastrze mogą być łatwo usunięte za pomocą rozpuszczalnika (np. benzyny ekstrakcyjnej), należy przy tym przestrzegać instrukcji użycia producenta.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Producent
LABORATOIRE HRA PHARMA

Galeria

