

Plomb-R, tymczasowe wypełnienie zęba, pasta, 3 g

Cena: 55,95 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	3 g
Postać	Pasta
Producent	TRIDENT S.A.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Plomb-R to wyrób medyczny w formie pasty o masie 3 g, przeznaczony do tymczasowego wypełnienia zęba. Produkt jest gotowy do samodzielnej aplikacji i zabezpiecza ubytek przed drażniącymi bodźcami zewnętrznymi. Jedno opakowanie wystarcza na około 10 aplikacji.

Działanie

Wyrób medyczny zabezpiecza ząb przed nadwrażliwością na zimno oraz przed czynnikami zewnętrznymi, jak bakterie i resztki jedzenia. Zabezpiecza również język i policzki przed ostrymi krawędziami szkliwa. Chroni przed bolesnym uciskiem na dziąsło w miejscu, gdzie brakuje zęba.

Sposób użycia

- Wyciśnij niewielką ilość preparatu i włóż do zęba który wymaga wypełnienia. Delikatnie zagryź. Pasta stwardnieje w kontakcie ze śliną.
- Odczekaj minutę i przepłucz usta dokładnie ciepłą wodą. Przez co najmniej 15 minut nie zagryzaj i nie dociskaj wypełnienia w zębie.
- Jak najszybciej zgłoś się do stomatologa.
- Nie używać w sposób ciągły dłużej niż 28 dni.

Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować w przypadku stanu zapalnego miazgi zębowej, odsłonięcia miazgi zębowej, patologicznej ruchliwości zęba oraz samoistnych bólach.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent

GAP RESEARCH COMPANY
Unit 2, Ebbsfleet Industrial Estate
Northfleet, Kent, Wielka Brytania