

Posiforlid, maska rozgrzewająca na oczy, 1 sztuka

Cena: 81,55 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	przyrząd
Producent	URSAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Rozgrzewające, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Posiforlid to medyczna maska termiczna przeznaczona do stosowania na okolice oczu. Wspomaga leczenie takich schorzeń jak dysfunkcja gruczołów Meiboma (MGD), jęczmień, gradówka oraz zespół suchego oka (ZSO), przynosząc ulgę poprzez działanie rozgrzewające.

Wskazania

Maseczka na oczy Posiforlid stosowana jest wspomagająco w leczeniu zapalenia brzegów powiek, dysfunkcji gruczołów Meiboma, jęczmienia i gradówki.

Stosowanie

Gradówka:

Stosować maskę od 4 do 5 razy dziennie. Pod wpływem ciepła wydzielina z gruczołu Meiboma stanie się bardziej płynna. Proces oczyszczania gruczołu można wspomagać, delikatnie masując okolice gruczołu czystym palcem. Nie ścisnąć ani nie usuwać gradówki, ale masować zgrubienie w kierunku oka i powoli wycisnąć ciekły łój w małych ilościach z zablokowanego gruczołu łojowego. Dzięki temu zgrubienie powoli zniknie.

Przeciwwskazania

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji używania lub etykietą.
- Wilgotne ciepło może pogorszyć niektóre formy egzem. Jeśli dolegliwości związane z egzemą ulegną pogorszeniu, zalecamy, aby zgłosić się do lekarza.
- Przy podwyższonym ciśnieniu śródgałkowym (jaskra) nie wolno wywierać zbyt dużego nacisku na oczy. Elastycznego zapięcia w tym przypadku nie należy zaciągać zbyt mocno lub wystarczy położyć maseczkę na oczy bez stosowania elastycznego zapięcia.
- W przypadku operacji jaskry lub zaćmy przed kilkoma miesiącami należy zachować ostrożność podczas masowania górnej powieki. Przed użyciem maseczki na oczy należy skonsultować się z okulistą.
- Nie należy stosować maseczki, jeśli jest nieszczelna lub uszkodzona.
- Nie używać maseczki bezpośrednio po wygotowaniu.

- Nie rozgrzewać maseczki w kuchence mikrofalowej ani bezpośrednio na płycie grzejnej.
- Nie wyciągać maseczki z garnka ostrym przedmiotem.
- Nie zezwalać dzieciom na wygotowywanie maseczki bez nadzoru osoby dorosłej.
- Przechowywać w temperaturze 15-35°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Uwagi

- Maseczkę na oczy stosować w połączeniu z płatkami kosmetycznymi, które można zakupić w supermarkecie lub drogerii. Do każdego zabiegu należy używać nowych i czystych płatków kosmetycznych.
- Po około 90 cyklach użycia działanie maseczki zmniejsza się. Aby skutecznie zwalczać dolegliwości, wymagana jest odpowiednia temperatura. Jeśli maseczka emituje mniej ciepła, należy wymienić ją na nową.

Producent

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35,
66129 Saarbrücken, Niemcy