

Prezerwatywy Durex Extra Safe U mnie czy u Ciebie?, 12 sztuk



Cena: 41,65 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Opakowanie	12 sztuk
Postać	Prezerwatywy
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Antykoncepcyjne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Prezerwatywy Durex Extra Safe U mnie czy u Ciebie? to przezroczyste, odrobinę grubsze prezerwatywy z naturalnej gumy lateksowej, o kształcie Easy-On, zakończone zbiorniczkiem. Posiadają większą ilość żelu nawilżającego dla jeszcze większego komfortu.

Działanie

- Antykoncepcja
- Zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową

Skład

Wykonane z naturalnej gumy lateksowej

Sposób użycia

- Przed otwarciem opakowania foliowego przesunąć umieszczoną wewnątrz prezerwatywę, aby jej nie uszkodzić przy rozrywaniu opakowania. Opakowanie foliowe otwierać delikatnie, nie używając ostrych narzędzi. Prezerwatywę wyjmować ostrożnie, by nie spowodować jej uszkodzenia np. paznokciem, biżuterią itp.
- Prezerwatywę należy założyć na penisa w stanie erekcji, przed jakimkolwiek kontaktem narządów płciowych partnerów. Tylko prawidłowe założenie pomoże uniknąć niepożądanego ciąży i zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. Prezerwatywę należy umieścić na czubku penisa, rulonikiem na zewnątrz.
- Kciukiem i palcem wskazującym jednej ręki należy chwycić zbiorniczek prezerwatywy w taki sposób, aby zapobiec dostaniu się powietrza do jej wnętrza – pozostawienie powietrza w prezerwatywie może spowodować jej pęknięcie. Drugą ręką nałożyć prezerwatywę na członka w stanie wzwodu. Prezerwatywa nie powinna ściśle przylegać do szczytu członka – należy pozostawić do 2 cm wolnego miejsca, a następnie rozwinąć rulonik aż do nasady penisa.
- Bezpośrednio po wytrysku nasienia ostrożnie wycofać penisa, przytrzymując mocno prezerwatywę przy jego nasadzie. Po

stosunku należy unikać kontaktu z pochwą zarówno zużytej prezerwatywy jak i penisa, aby nie dopuścić do przedostania się spermy. Zużyta prezerwatywę należy zawinąć w papier i wyrzucić do śmieci (nie do toalety).

Przeciwwskazania

U osoby uczulonej na lateks prezerwatywy wykonane z naturalnej gumy lateksowej mogą być przyczyną wystąpienia reakcji alergicznej, włączając szok anafilaktyczny.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Żadna metoda antykoncepcji nie zapewnia 100% ochrony przed ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Producent

SSL HEALTHCARE

Galeria

