

Prezerwatywy Durex Performa Emoji, 3 sztuki



Cena: 122,09 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Opakowanie	3 sztuki
Postać	Prezerwatywy
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Antykoncepcyjne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Durex Emoji Performa to prezerwatywy pokryte specjalnym lubrykantem, przedłużającym stosunek. Prezerwatywy wykonane są z naturalnej gumy lateksowej, zakończone zbiorniczkiem.

Działanie

Prezerwatywy to jedyny środek antykoncepcyjny zapobiegający chorobom przenoszonym drogą płciową.

Sposób użycia

- Krok 1

Przed otwarciem opakowania foliowego przesunąć umieszczoną wewnątrz prezerwatywę, aby jej nie uszkodzić przy rozrywaniu opakowania.

Opakowanie foliowe otwierać delikatnie, nie używając ostrych narzędzi. Prezerwatywę wyjmować ostrożnie, by nie spowodować jej uszkodzenia np. paznokciem, biżuterią itp.

- Krok 2

Prezerwatywę należy założyć na penisa w stanie erekcji, przed jakimkolwiek kontaktem narządów płciowych partnerów. Tylko prawidłowe założenie pomoże uniknąć niepożądaney ciąży i zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Prezerwatywę należy umieścić na czubku penisa, rulonikiem na zewnątrz.

- Krok 3

Kciukiem i palcem wskazującym jednej ręki należy chwycić zbiorniczek prezerwatywy w taki sposób, aby zapobiec dostaniu się powietrza do jej wnętrza – pozostawienie powietrza w prezerwatywie może spowodować jej pęknięcie. Drugą ręką nałożyć prezerwatywę na członek w stanie wzwodu.

Prezerwatywa nie powinna ściśle przylegać do szczytu członka – należy pozostawić do 2 cm wolnego miejsca, a następnie rozwinąć rulonik aż do nasady penisa.

- Krok 4

Bezpośrednio po wytrysku nasienia ostrożnie wycofać penisa, przytrzymując mocno prezerwatywę przy jego nasadzie. Po stosunku należy unikać kontaktu z pochwą zarówno zużytej prezerwatywy jak i penisa, aby nie dopuścić do przedostania się spermy. Zużyta prezerwatywę należy zawinąć w papier i wyrzucić do śmieci (nie do toalety).

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

- Produkt testowany dermatologicznie.
- Prezerwatywa może być użyta tylko raz.
- Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed ciążą, wirusem HIV czy chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Producent

RECKITT BENCKISER

Galeria

