

Proctanal Enema Wlewka doodbytnicza, 120 ml



Cena: 19,02 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PROCTANAL
Opakowanie	120 ml
Postać	Wlewka
Producent	MIRALEX SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Układ pokarmowy, Zaparcia
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Proctanal Enema to wyrób medyczny w postaci wlewki doodbytniczej, stosowany w leczeniu zaparć towarzyszących takim objawom jak silny ból, obrzęk i trudności w oddawaniu stolca. Może być również używany do przygotowania pacjenta do zabiegów operacyjnych lub określonych badań diagnostycznych poprzez oczyszczanie przewodu pokarmowego.

Wskazania

- Leczenie zaparć, zwłaszcza gdy występują w postaci uporczywej i powodują znaczny dyskomfort i złe samopoczucie u pacjenta
- Przygotowanie do badań radiologicznych i endoskopowych końcowego odcinka jelita, przed- i pooperacyjne oczyszczanie jelit

Działanie

Fosforan sodu w postaci wlewek doodbytniczych stosowany w celu oczyszczenia jelita grubego. Poprzez działanie osmotyczne w świetle jelita grubego zapobiega wchłanianiu wody powodując zmiękczenie mas kałowych. Zwiększenie objętości i zmiękczenie mas kałowych prowadzi do natychmiastowego pobudzenia odruchu defekacji.

Składniki

Substancje czynne: Sodu diwodorofosforan dwuwodny, Disodu fosforan dwunastowodny.

Sposób użycia

- Wlewka doodbytnicza Proctanal enema może być stosowana w temperaturze pokojowej. W przypadku preferowania stosowania ciepłych wlewek, wystarczy ogrzać w ciepłej wodzie poprzez jej zanurzenie lub w strumieniu ciepłej wody pod kranem.
- Aby uzyskać najlepszy efekt, położyć się na lewym boku. Należy usunąć opaskę ochronną z aplikatora doodbytniczego, ściągnąć osłonkę z butelki i nałożyć aplikator. Chwycić butelkę i delikatnie wprowadzić aplikator do odbytu, a następnie powoli wycisnąć całą zawartość butelki. Może się zdarzyć, że niewielka ilość wlewki pozostanie w butelce. Po zakończeniu aplikacji, należy poczekać w pozycji leżącej do momentu pocucia silnej potrzeby wypróżnienia.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Nie stosować do długotrwałego leczenia.
- Po krótkim okresie leczenia bez widocznych rezultatów oraz w przypadku utrzymujących się zaparć należy skonsultować się z lekarzem w celu wykluczenia innych zaburzeń.
- Wlewka doodbytnicza jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku, dlatego każda butelka powinna być użyta tylko do jednego podania.
- Produkt nie jest przeznaczony wyłącznie do badań diagnostycznych.

Producent

New.Fa.Dem. S.r.l.
Viale Ferrovie dello Stato,1 – Zona ASI
Giugliano in Campania (NA), Italy

Galeria

