

## Prontosan acute, żel na rany, 30 g

Cena: 54,28 zł



### Opis słownikowy

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                                                  |
| Opakowanie      | 30 g                                                                      |
| Postać          | Żel                                                                       |
| Producent       | AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.                                                 |
| Przeznaczenie   | Chłodzące, Nawilżające, Oczyszczające, Przeciwbólowe, Ułatwiające gojenie |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny                                                            |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów                                               |

### Opis produktu

#### Opis

**Prontosan Acute** to żel przeznaczony do pielęgnacji ran, który zawiera neutralne pH hydrokoloidy. Dzięki temu przyspiesza proces gojenia ran i zmniejsza ryzyko powstawania blizn. Żel natychmiastowo łagodzi ból poprzez efekt chłodzenia. Jest gotowy do użycia, przezroczysty, bez zapachu i bezbarwny. Produkt jest dobrze tolerowany przez skórę, nie powoduje podrażnień ani uczuleń, a jego aplikacja jest bezbolesna. Ponadto, żel jest wolny od substancji zapachowych i barwników, co eliminuje pozostawianie jakichkolwiek śladów na skórze i tkankach. Prontosan Acute przeszedł testy dermatologiczne.

#### Składniki

Woda oczyszczona, glicerol, hydroksyetyloceluloza, substancja powierzchniowo czynna betaina, 0,1% biguanidyna poliaminopropylu (poliheksanidyna).

#### Zastosowanie

Żel na rany to hydrożel do pielęgnacji ran, który przyspiesza proces gojenia się rany. Produkt po nałożeniu na ranę reguluje poziom nawilżenia rany, przez co stwarza idealnie wilgotne warunki do gojenia. Żel jest wskazany do lekkich oparzeń i powierzchownych ran (np. otarcia i przecięcia).

#### Sposób użycia

Nie stosować żelu na rany zainfekowane lub obficie sączące. Zarówno przed jak i po zakończeniu procedury pielęgnacji rany należy umyć ręce. Przed aplikacją żelu należy dokładnie oczyścić i osuszyć ranę. Żel należy nałożyć (bez wcierania) na ranę raz lub dwa razy dziennie (w przypadku poparzeń słonecznych należy stosować żel od dwóch do sześciu razy dziennie). W razie potrzeby ranę osłonić (sterylnym) opatrunkiem, który należy codziennie zmieniać. Żelu na rany nie należy stosować nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni.

#### Producent

Aesculap Chifa Sp. z o.o.  
ul. Tysiąclecia 14  
64-300 Nowy Tomyśl



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943