

Prontosan, roztwór do przemywania ran, 1000 ml

Cena: 154,09 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 l (but.)
Postać	Roztwór
Producent	AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Antybakteryjne (przeciwbakteryjne), Dezynfekujące (odkażające), Oczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Prontosan to sterylny, bezbarwny i bezzapachowy roztwór przeznaczony do irygacji ran. Jest to dwuskładnikowy preparat do oczyszczania ran, zawierający PHMB oraz betainę. Można go stosować do irygacji różnego rodzaju ran, zarówno ostrych, jak i przewlekłych. Prontosan skutecznie oczyszcza rany, eliminując wysięki i martwe tkanki, a także neutralizując nieprzyjemne zapachy. Produkt zapobiega infekcjom i tworzeniu się biofilmów, utrzymuje odpowiednią wilgotność rany oraz redukuje blizny. Tworzy antybakteryjną barierę, wspiera proliferację fibroblastów i keratynocytów, przyspieszając gojenie i epitelializację. Roztwór nie zakłóca działania naturalnej flory bakteryjnej w innych częściach ciała, takich jak jelita, i może być stosowany jako alternatywa dla antybiotyków w profilaktyce zakażeń pooperacyjnych. Prontosan cechuje się wysoką biogodnością i jest dobrze tolerowany przez organizm.

Składniki

Woda do wstrzyknięć, Glicerol, Hydroksyetyloceluloza, 0,1% Undecylenamidopropyl Betainy, 0,1% Biguanid Poliaminopropylu (Poliheksanidyna).

Zastosowanie

Roztwór Prontosan stosowany jest:

- do oczyszczania ran z wysięku, nekrotycznych zmian w ranie (suchej i rozpułwnej martwicy), fizycznych i chemicznych zanieczyszczeń, maści, żeli, przyschniętych opatrunków
- do zapobiegania tworzeniu się biofilmów,
- do pochłaniania zapachów wydzielanych z rany,
- do śródoperacyjnego czyszczenia i płukania ran,
- do przemywania rany przed aplikacją żelu Prontosan X,
- do usuwania zaschniętych opatrunków,
- do pielęgnacji skóry wokół dostępu naczyniowych obwodowych i centralnych (kaniula dożylna, CVC, cewnik tunelizowany, port naczyniowy),
- do pielęgnacji skóry wokół dostępu do przewodu pokarmowego (PEG, PEJ), lub wokół drenów czy okolic stomii,
- w terapii podciśnieniowej,

- na błony śluzowe - przed badaniami ginekologicznymi i cewnikowaniem,
- jako alternatywa dla profilaktyki antybiotykowej w przypadku ran pooperacyjnych w ramach zapobiegania zakażeniom miejsc leczonych operacyjnie,

Sposób użycia

- Roztwór może być podawany bezpośrednio z butelki lub pojemnika bądź też na wilgotne okłady.
- Preparat można stosować bezpośrednio na rany wielu różnych typów bez potrzeby wcześniejszego przygotowania.
- W razie potrzeby podgrzej roztwór Prontosan do temperatury ciała bezpośrednio przed zastosowaniem.
- Zdezynfekuj ręce i załóż sterylne rękawice.
- Użyj roztworu bezpośrednio na opatrunek przed jego zmianą, aby go bezurazowo i bezboleśnie usunąć. (w przypadku zaschniętych opatrunków).
- Usuń ostrożnie opatrunek. Dokonaj jego oceny.
- Nawilż ranę oraz skórę wokół rany roztworem, aby oczyścić powierzchnię z zanieczyszczeń oraz odkażenia.
- Pomimo iż roztwór może być stosowany jako płyn do oczyszczania czy nawilżania ran, zaleca się, aby opatrunki z gazy zostały nasączone w roztworze i przyłożone do rany na 15 minut lub zgodnie z lokalnie przyjętą procedurą.
- Roztwór może być stosowany niezależnie, jednakby celu osiągnięcia jak najlepszych wyników zaleca się stosowanie go wraz z żelem do ran Prontosan lub żelem Prontosan X. Pozwoli to na oczyszczenie rany oraz utrzymanie należytego nawilżenia do następnej zmiany opatrunku.

Ostrzeżenia

- Nie łączyć z innymi środkami do oczyszczania ran lub maściami.
- Nie stosować w przypadku stwierdzonej lub podejrzewanej alergii na betainę lub PHMB.
- Nie stosować w obszarze ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych, w uchu środkowym i wewnętrznym, ani na oku czy tkance chrzęstnej szklistej podczas operacji.
- Chociaż mało prawdopodobne jest szkodliwe działanie produktu Prontosan, ponieważ nie jest on wchłaniany ogólnoustrojowo, u kobiet w ciąży, karmiących piersią i u dzieci należy go stosować pod nadzorem lekarza ze względu na brak odpowiednich badań klinicznych.
- Chronić butelkę przed światłem słonecznym.
- Chronić przed dziećmi.
- Produkt nie jest przeznaczony do infuzji.

Ważne wskazówki

- Produkt zapobiega wtórnym infekcjom.
- Preparat nie drażni, nie uczula, nie powoduje dolegliwości bólowych.
- Stabilizuje pH na poziomie fizjologicznym (pH 5-6).
- Roztwór może być stosowany u jednego pacjenta do ośmiu tygodni po otwarciu opakowania.
- Produkt jałowy, nietoksyczny dla tkanek.
- Zgodny z każdym rodzajem opatrunku (w tym zawierającym srebro).
- Produkt nie zawiera glicerolu - ułatwione przyklejanie opatrunków.
- Potwierdzona badaniami skuteczność mikrobójcza, skuteczny w obciążeniu białkowym oraz przy zmiennym pH

Producent

B.Braun Melsungen AG,
34212 Melsungen, Hessen,
Germany