

Prontosan, żel do przemywania ran, 30 ml

Cena: 87,46 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 ml
Postać	Żel
Producent	AESULAP CHIFA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Dezynfekujące (odkażające), Nawilżające, Oczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Prontosan Wound Gel w pojemności 30 ml to specjalistyczny żel przeznaczony do sterylizacji ran poprzez ich oczyszczanie, dekontaminację oraz nawilżanie. Produkt dedykowany jest do pielęgnacji zarówno ostrych, jak i przewlekłych ran, w tym ran po oparzeniach I i II stopnia. Żel można stosować nawet na ranach z dużą ilością bakterii, które są skolonizowane lub zainfekowane. Jest kompatybilny z powszechnie stosowanymi opatrunkami stosowanymi do leczenia ran.

Składniki

Woda do wstrzyknięć, Glicerol, Hydroksyetyloceluloza, 0,1% Undecylenamidopropyl, Betainy, 0,1% Biguanid Poliaminopropylu (Poliheksanidyna).

Zastosowanie

Do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżania ran ostrych i przewlekłych ran, takich jak: rany urazowe, pooperacyjne, przewlekłe owrzodzenia żyłne i tętnicze, zakażony zespół stopy cukrzycowej, oparzenia termiczne i chemiczne I i II stopnia.

Sposób użycia

- Ranę należy przepłukać i oczyścić roztworem do płukania ran Prontosan.
- Żel Prontosan Gel należy obficie nałożyć na ranę. Zagłębienia i uchyłki należy wypełnić żelem.
- Opatrunki, gazę, kompresy lub inne wchłaniające materiały wypełniające ranę można przed założeniem opatrunku zwilżyć żelem Prontosan Gel.

Ostrzeżenia

- Nie stosować: w przypadku stwierdzonej alergii na którykolwiek ze składników produktu; na CUN lub opony mózgowo-rdzeniowe; w uchu środkowym lub wewnętrznym; na oczy; na chrząstkę szklistą oraz w aseptycznych zabiegach chirurgicznych stawów. Jeśli produkt zetknie się z aseptyczną chrząstką, należy go niezwłocznie spłukać solą fizjologiczną; w połączeniu z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi; w połączeniu z mydłami, maściami, olejkami, enzymami i podobnymi

środkami czyszczącymi. Substancje te należy dokładnie usunąć z rany przed użyciem produktu.

- Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem produktu Prontosan Gel powinny skonsultować się z lekarzem.

Ważne wskazówki

- Produkt do użytku zewnętrznego. Do wielokrotnego i długotrwałego stosowania.
- Prontosan żel sterylizowany na rany może być stosowany do 8 tygodni po otwarciu opakowania.
- Należy chronić butelkę przed światłem słonecznym.
- Przechowywać Prontosan Gel w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas stosowania należy chronić szczyt butelki przed zanieczyszczeniem.
- Butelkę, która miała bezpośredni kontakt z raną lub została zanieczyszczona w inny sposób, należy usunąć.

Producent

B.BRAUN