

Protefix Higiena, aktywne tabletki czyszczące do protez zębowych i aparatów ortodontycznych, 66 sztuk



Cena: 39,77 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	66 sztuk
Postać	Tabletki
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG
Przeznaczenie	Czyszczące, Dezynfekujące, Oczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Protefix Higiena to aktywne tabletki czyszczące, idealne do protez zębowych i aparatów ortodontycznych. Tabletki marki Protefix skutecznie i szybko usuwają trudne osady z protez i aparatów, jednocześnie dezynfekując je i eliminując nieprzyjemne zapachy. Podobnie jak na naturalnych zębach, na protezach i aparatach ortodontycznych osadzają się resztki jedzenia. Jeśli nie są one codziennie usuwane, mogą prowadzić do tworzenia się osadów bakteryjnych i stanów zapalnych. Dlatego staranna higiena jamy ustnej i regularne czyszczenie protez zębowych są niezbędne.

Składniki

Potassium Caraoate, Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sodium Carbonate, Sorbitol, VP/VA Copolymer, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Aroma, CI 73015.

Zastosowanie

Tabletki do higienicznego czyszczenia protezy i aparatów ortodontycznych.

Sposób użycia

- Oczyszczyć protezę lub aparat przy pomocy szczoteczki.
- Wrzucić jedną tabletkę Protefix Higiena do połowy szklanki letniej wody.
- Włożyć protezę/aparat do musującego roztworu tak, by była ona całkowicie zanurzona.
- Po około 10 minutach wyjąć protezę i dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
- Nie stosować tabletek ani ich roztworu w jamie ustnej.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Ważne wskazówki

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej.
- Chronić przed wilgocią.

Producent

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg, Niemcy