

Protefix Higiena pasta czyszcz.d/protez 75

Cena: 14,95 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	75 ml
Postać	-
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Opis produktu

Opis

Aby zapewnić odpowiednią higienę i pielęgnację protez zębowych, zaleca się przestrzeganie kilku ważnych kroków. Po każdym większym posiłku protezę należy wyjąć i dokładnie oczyścić. Można to zrobić przy użyciu specjalnej szczoteczki do czyszczenia protez oraz pasty do czyszczenia protez, takiej jak Protefix HIGIENA. Należy szczotkować protezę delikatnie, usuwając resztki pokarmu i osadu. Następnie protezę należy dokładnie spłukać pod bieżącą wodą. Dodatkowo, ważne jest regularne namaczanie protezy w specjalnych roztworach czyszczących lub woda z płynem do płukania jamy ustnej. Może to pomóc w usunięciu osadu i zapachu z protezy. Protezę należy również przechowywać w czystym i suchym miejscu, najlepiej w specjalnym pojemniku na protezy, aby uniknąć zanieczyszczeń.

Składniki

Purified Water, Sorbitol, Glycerin, Silica, Sodium Dodecylsulphate, Xanthan Gum, Medium-chaine Triglyceride, Arome, Titanium Dioxide, Methylparaben, Ethylparaben, Sodium Saccharin (sacharynian sodu), Propylparaben.

Zastosowanie

Do czyszczenia protezy lub aparatu.

Sposób użycia

Nałożyć pasek pasty na szczoteczkę do czyszczenia. Wyczyścić szczoteczką obie strony protezy lub aparatu. Wyszorować pod bieżącą wodą. Na koniec dokładnie przepłukać po bieżącą wodą.