

Protefix, krem mocujący, 47 g

Cena: 24,95 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PROTEFIX
Opakowanie	47 g
Postać	krem
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Przeznaczenie	Protezy zębowe
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Protefix krem mocujący ekstra mocny, 47 g, to wyrób medyczny przeznaczony do stabilizowania pełnych i częściowych protez zębowych.

Wskazania

Wyrób medyczny Protefix krem mocujący jest polecany do mocowania protez całkowitych i częściowych.

Działanie

Wyrób medyczny Protefix krem mocujący ma wielotorowe działanie, zapewniające poczucie pewności i komfortu na cały dzień:

- Dzięki silniejszemu działaniu mocuje protezę na dłużej,
- Działa natychmiastowo, nawet na wilgotnej protezie,
- Skutecznie uszczelnia protezę przed drobinkami jedzenia,
- Chroni dziąsła przed uciskiem protezy,
- Zapewnia długotrwały komfort noszenia protezy całkowitej i częściowej.

Skład

Mieszanina soli Na i Ca kopolimeru eteru metylowinyloвого i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu, mentol, azorubina, benzoosan metylu.

Sposób użycia

Krem mocujący Protefix należy stosować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. W skrócie:

- Nałożyć na oczyszczoną, wilgotną lub suchą protezę.
- Nakładać małą ilość kremu, krótkimi odcinkami. Potrzeba kilku prób, aby ustalić jaka ilość kremu jest konieczna, a jednocześnie nie wypływa spod protezy.



- Protezę założyć, przycisnąć, a następnie lekko przygryźć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu.
- Po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie wpływa to na siłę mocującą kleju.
- Po użyciu należy starannie zamknąć tubę, uważając by nie dostała się do niej woda. Wilgoć po dostaniu się do tuby może spowodować stwardnienie kremu mocującego.
- Przy podanym sposobie używania krem można stosować długotrwale.

Ostrzeżenia

- Krem mocujący nie jest w stanie zastąpić dobrego dopasowania protezy przez lekarza stomatologa lub protetyka. Jeśli stwierdzą Państwo, że krem działa słabiej niż zwykle lub czują jego wyciek w trakcie stosowania – należy skonsultować się ze swoim lekarzem. Mogą to być objawy złego dopasowania protezy.
- Używanie protezy wymaga regularnej higieny jamy ustnej i samej protezy.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.
- W przypadku zaistnienia podejrzenia alergii należy przerwać stosowanie kremu i skonsultować się z lekarzem stomatologiem.
- Przy ponawiających się stanach zapalnych lub uszkodzeniach błony śluzowej - przed zastosowaniem kremu skonsultować się z dentystą.
- Należy uważać, aby do tuby z kremem nie dostała się woda, ponieważ może to spowodować stwardnienie kremu.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C).
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas prawidłowego użytkowania kremu może naturalnie dochodzić do połykania niewielkich ilości kremu, co nie jest szkodliwe dla organizmu.

Producent

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg, Niemcy
info@queisser.de