

Protefix, krem mocujący z aloesem, 47 g

Cena: 26,75 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PROTEFIX
Opakowanie	47 g
Postać	krem
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Przeznaczenie	Protezy zębowe
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Protefix krem mocujący z aloesem, ekstra mocny, 47 g, to wyrób medyczny przeznaczony do mocowania pełnych i częściowych protez zębowych. Dzięki zawartości wyciągu z aloesu wspomaga regenerację dziąseł.

Wskazania

Wyrób medyczny Protefix, krem mocujący z aloesem jest polecany do mocowania protez całkowitych i częściowych.

Działanie

Wyrób medyczny Protefix, krem mocujący z aloesem działa na wiele sposobów:

- Dzięki zawartości wyciągu z aloesu wspomaga gojenie i regenerację dziąseł,
- Mocuje protezę na dłużej,
- Działa natychmiastowo, nawet na wilgotnej protezie,
- Skutecznie uszczelnia protezę przed drobinkami jedzenia,
- Chroni dziąsła przed uciskiem protezy,
- Zapewnia długotrwały komfort noszenia protezy całkowitej i częściowej.

Skład

Mieszanina soli Na i Ca kopolimeru eteru metylowinyloвого i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, ekstrakt Aloe Vera Barbadensis, koloidalny dwutlenek krzemu, mentol, azorubina, benzoosan metylu.

Sposób użycia

Protefix, krem mocujący z aloesem należy stosować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. W skrócie:

- Nałożyć na oczyszczoną, wilgotną lub suchą protezę.
- Nakładać małą ilość kremu, krótkimi odcinkami. Potrzeba kilku prób, aby ustalić jaka ilość kremu jest konieczna, a jednocześnie

nie wypływa spod protezy.

- Protezę założyć, przycisnąć, a następnie lekko przygryźć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu.
- Po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie wpływa to na siłę mocującą kleju.
- Po użyciu należy starannie zamknąć tubę, uważając by nie dostała się do niej woda. Wilgoć po dostaniu się do tuby może spowodować stwardnienie kremu mocującego.
- Przy podanym sposobie używania krem można stosować długotrwale

Ostrzeżenia

- Krem mocujący nie jest w stanie zastąpić dobrego dopasowania protezy przez lekarza stomatologa lub protetyka. Jeśli stwierdzą Państwo, że krem działa słabiej niż zwykle lub czują jego wyciek w trakcie stosowania – należy skonsultować się ze swoim lekarzem. Mogą to być objawy złego dopasowania protezy.
- Używanie protezy wymaga regularnej higieny jamy ustnej i samej protezy.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.
- W przypadku zaistnienia podejrzenia alergii należy przerwać stosowanie kremu i skonsultować się z lekarzem stomatologiem.
- Przy ponawiających się stanach zapalnych lub uszkodzeniach błony śluzowej - przed zastosowaniem kremu skonsultować się z dentystą.
- Należy uważać, aby do tuby z kremem nie dostała się woda, ponieważ może to spowodować stwardnienie kremu.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25oC).
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas prawidłowego użytkowania kremu może naturalnie dochodzić do połykania niewielkich ilości kremu, co nie jest szkodliwe dla organizmu.

Uwagi

Po użyciu należy starannie zamknąć tubę, uważając by nie dostała się do niej woda.

Producent

QUEISSER
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
info@queisser.de