

## Protefix, podściółka mocująca dla żuchwy, 30 sztuk

Cena: 27,69 zł



### Opis słownikowy

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn    |
| Marka           | PROTEFIX                    |
| Opakowanie      | 30 sztuk                    |
| Postać          | Podściółka mocująca         |
| Producent       | QUEISSER PHARMA GMBH & CO.  |
| Przeznaczenie   | Protezy zębowe              |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny              |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów |

### Opis produktu

#### Opis

**Protefix** podściółki mocujące do żuchwy to wyrób medyczny przeznaczony wyłącznie do protez całkowitych. Nie wpływają na odczucia smakowe i pewnie mocują protezę zębową.

#### Wskazania

Podściółki mocujące Protefix do protez zębowych dla żuchwy, są polecane dla osób noszących całkowite protezy zębowe:

- Mogą być stosowane w pierwszym okresie przystosowywania się do nowej protezy.
- Służą do mocowania i ochrony dziąseł przed uciskiem.

#### Działanie

Podściółki mocujące Protefix do protez zębowych dla żuchwy, to płatki miękkiej i cienkiej ligniny wiskozowo-polipropylenowej, która jest nasyczona alginianem sodu o właściwościach adhezyjnych (mocujących):

- Mogą być stosowane w pierwszym okresie przystosowywania się do nowej protezy.
- Zabezpieczają przy odchyleniach anatomii zgryzu.
- Pewnie mocują, chronią przed uciskaniem.
- Nie wpływają na odczucia smakowe.
- Przeznaczone są tylko do protez całkowitych.

#### Skład

Alginian sodowy, włókna wiskozowo-polipropylenowe.

#### Sposób użycia

- Należy sprawdzić wielkość protezy. W razie potrzeby przyciąć podściółkę nożyczkami.



- Pościółkę zwilżyć letnią wodą, zanurzając ją na ok. 10 sekund. Następnie wyjąć i pozwolić wodzie odcieknąć.
- Podściółkę docisnąć palcem do zagłębienia zuchwowego protezy (zaczynając od środka), aż będzie w każdym miejscu gładko przylegała. Założyć protezę, lekko dociskając.
- Wskazówka: w przypadku zmniejszenia przyczepności wyjąć protezę, posypać podściółkę proszkiem mocującym Protefix.
- Podściółkę należy wymieniać przynajmniej raz dziennie i dbać o czystość jamy ustnej i protezy.

#### **Przeciwwskazania**

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- Nie stosować przy protezach częściowych.
- Dla zapewnienia właściwego dopasowania protezy należy regularnie konsultować się ze stomatologiem.
- Przy ponawiających się stanach zapalnych i poczuciu, że proteza trzyma się słabiej, należy skonsultować się ze stomatologiem.
- Przechowywać w suchym miejscu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### **Uwagi**

Nie używać po upływie terminu ważności.

#### **Producent**

QUEISSER  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg  
info@queisser.de