

Protefix podściółki moc. zuchwa 30 szt.



Cena: 21,14 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 szt.
Postać	-
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Opis produktu

Opis

Stosowanie podściółek mocujących może być szczególnie korzystne w przypadku trudnych warunków mocowania protezy, takich jak zanik wyrostka zębodołowego u pacjentów w podeszłym wieku. Zanik wyrostka zębodołowego to proces, w którym dochodzi do utraty masy kostnej wokół zębów, co może prowadzić do pogorszenia stabilności protezy.

Podściółki mocujące mogą pomóc w zwiększeniu przyczepności protezy do dziąseł poprzez wypełnienie przestrzeni między protezą a dziąsłem. Działają one jako dodatkowe wsparcie dla protezy, zapewniając lepszą stabilność i zmniejszając możliwość przesuwania się protezy podczas jedzenia, mówienia i innych codziennych czynności.

Składniki

Alginian sodowy, włókna wiskozowo- polipropylenowe.

Zastosowanie

Mocowanie protezy całkowitej.

Sposób użycia

Podściółkę mocującą przyciąć do wielkości protezy, zanurzyć na ok. 10 sekund w letniej wodzie, nałożyć na oczyszczoną, wilgotną protezę i przycisnąć.

Dodatkowe informacje

Zaleca się regularną wymianę podściółek mocujących po każdym posiłku. Podściółki te mają tendencję do pochłaniania barwników pokarmowych oraz rozmięczonych resztek jedzenia, co może prowadzić do utraty ich skuteczności oraz powstawania nieprzyjemnego zapachu. Właściwa higiena i czystość protezy są kluczowe dla utrzymania zdrowej jamy ustnej.