

Protefix, podściółki mocujące do protez zębowych, dla szczęki, 30 sztuk



Cena: 27,69 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PROTEFIX
Opakowanie	30 sztuk
Postać	-
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Podściółki mocujące do protez zębowych dla szczęki Protefix to rozwiązanie zapewniające pewne mocowanie i ochronę przed dyskomfortem związanym z uciskiem. Są one przeznaczone do stabilnego przytwierdzenia pełnych protez zębowych szczęki, utrzymując je na miejscu i zabezpieczając przed przesunięciami wynikającymi z różnic w anatomii zgryzu.

Składniki

Alginyan sodowy, włókna wiskozowo- polipropylenowe.

Zastosowanie

- Podściółki mocujące do szczęki.
- Mocowanie protez całkowitych.

Sposób użycia

- Sprawdź wielkość protezy. Jeżeli proteza jest mała, dopasuj podściółkę poprzez przycięcie jej nożyczkami wzdłuż jej prostego brzegu.
- Zwilż podściółkę, zanurzając ją na około 10 sekund w letniej wodzie.
- Wyjmij podściółkę i pozwól wodzie obcieknąć.
- Nałóż podściółkę (wybierz dowolną stronę) na zwilżoną protezę, pozostawiając tyle 2 mm protezy nieprzykryte.
- Docisnij podściółkę, rozpoczynając od środka, kończąc na obrzeżach.
- Upewnij się, że podściółka gładko przylega w każdym miejscu.
- Zmieniaj podściółkę mocującą co najmniej 1 raz dziennie.
- Dbaj o higienę jamy ustnej i protezy.



Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Nie stosuj podściółki mocującej w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
- W pojedynczych przypadkach niewykluczone są reakcje alergiczne śluzówki jamy ustnej lub całego organizmu. W przypadku zaistnienia podejrzenia alergii skonsultuj się z lekarzem stomatologiem.
- Przy ponawiających się stanach zapalnych lub uczuciu, że proteza trzyma się słabiej, skonsultuj się z lekarzem.
- Nie stosuj podściółek mocujących przy protezach częściowych.
- Nie stosuj produktu po upływie terminu ważności.

Ważne wskazówki

- Przy stosowaniu podściółek powinno się je zmieniać po każdym posiłku (po dokładnym oczyszczeniu protezy), ponieważ podściółka pochłania łatwo barwniki pokarmowe i rozmiękczony pokarm.
- Protefix, podściółki mocujące do szczęki, 30 sztuk przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, w suchym miejscu.
- Dla zapewnienia odpowiedniego dopasowania protezy regularnie konsultuj się ze stomatologiem.

Producent

Queisser Pharma GmbH&Co KG
Export Department
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg