

Protefix XXL, krem mocujący, 47 g x 2 opakowania (1 + 1 za 50% ceny)

Cena: 40,57 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PROTEFIX
Opakowanie	94 g
Postać	krem
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Przeznaczenie	Protezy zębowe
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Protefix Krem mocujący Ekstra mocny XXL to wyrób medyczny przeznaczony do mocowania protez całkowitych i częściowych. Zapewnia poczucie pewności i komfortu przez cały dzień.

Wskazania

Protefix XXL krem mocujący przeznaczony jest do mocowania protez zębowych pełnych i częściowych.

Działanie

Protefix XXL krem mocujący

- Silniejsze działanie: przedłużone mocowanie.
- Szybki efekt: działa natychmiastowo - nawet na wilgotnej protezie.
- Skuteczne uszczelnienie protezy przed drobinkami jedzenia.
- Ochrona przed uciskiem protezy.
- Długotrwały komfort noszenia protezy całkowitej i częściowej.

Skład

Mieszanka soli sodu i wapnia kopolimeru eteru metylowinyloвого i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu, mentol, azorubina, benzoosan metylu.

Sposób użycia

- Krem można stosować na oczyszczoną, suchą, lub wilgotną protezę.
- Po użyciu kremu, należy zamknąć tubę, uważając, by nie dostała się do niej woda. Dostanie się wody do tuby może spowodować



stwardnienie kremu mocującego.

Ostrzeżenia

- Niektóre osoby mogą być uczulone na pojedyncze składniki kremu. W przypadku podejrzenia alergii należy przerwać stosowanie kremu i skonsultować się z lekarzem stomatologiem.
- Krem mocujący nie jest w stanie zastąpić prawidłowego dopasowania protezy przez lekarza stomatologa lub protetyka.
- Podczas prawidłowego stosowania kremu, może naturalnie dochodzić do połykania niewielkich ilości kremu, co nie jest szkodliwe dla organizmu.
- Przy ponawiających się stanach zapalnych lub uszkodzeniach błony śluzowej - przed zastosowaniem kremu skonsultować się z dentystą. Używanie protezy wymaga regularnej higieny jamy ustnej i protezy.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 °C).
- Chronić przed dostaniem się wilgoci do tubki.

Producent

QUEISSER
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
info@queisser.de