

Pulsoksymetr CONTEC CMS50D, 1 sztuka

Cena: 14,89 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	pulsoksymetr
Producent	NOVAMED SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Pulsoksymetr CONTEC CMS50D to medyczne urządzenie do użytku domowego, umożliwiające pomiar saturacji krwi oraz tętna u młodzieży, dorosłych i osób starszych, wspierając kontrolę zdrowia na co dzień.

Działanie

Urządzenie przy pomocy metody transmisji optycznej wykonuje pomiar zawartości oksyhemoglobiny (HbO₂) we krwi tętnicy palcowej pacjenta.

Przeznaczenie

Produkt może być używany zarówno, w domu, szpitalu, barach tlenowych, domach opieki, czy klubach sportowych.

Sposób użycia

1. Włącz pulsoksymetr.
2. Wsuń palec do końca szczeliny urządzenia, tak aby paznokieć skierowany był w stronę sufitu.
3. Odczytaj zmierzone wartości.
4. Wyłącz urządzenie.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w miejscach w których obecny jest obrzęk lub podrażnienie.
- Nie stosować u pacjentów w trakcie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.
- Nie stosować u noworodków i niemowląt.
- Nie używać w środowisku wysokiej częstotliwości np. w obecności sprzętu elektrochirurgicznego.
- Nie używać jeśli urządzenie uległo uszkodzeniu.
- Urządzenie emituje szkodliwą dla oczu podczerwień, nie należy patrzeć na jej źródło.

Uwagi



Zaleca się stosowanie pulsoksymetru na jednym palcu nie dłużej niż 30 minut, inaczej, szczególnie u pacjentów z problemami z mikrokrążeniem może pojawić się ból.

Produkt jest urządzeniem diagnostycznym, wyniki należy skonsultować z lekarzem.

Używanie pulsoksymetru na ramieniu na którym znajduje się ciśnieniomierz, cewnik lub linia infuzyjna, nadmierne światło, wilgoć wewnątrz urządzenia, palec poza zakresem rozmiarów, słabe tętno, pulsacja żylna, anemia, niskie stężenie hemoglobiny, barwniki wewnątrznaczyniowe, karboksyhemoglobina, methemoglobina, dysfunkcyjne wartości hemoglobiny, zatrucie tlenkiem węgla, lakier do paznokci oraz sztuczne paznokcie mogą negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia i dokładność pomiaru.

Chronić przed kurzem, wilgocią, wstrząsami, ekstremalnymi temperaturami oraz obecnością substancji wybuchowych.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

Contec Medical Systems Co., LTD

No. 112 Qinhuang West Street

066004 Qinhuangdao

cms@contecmed.com.cn