

Pylori-Screen, szybki test do wykrywania przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori, 1 sztuka

Cena: 23,37 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LABHOME
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	ZBADAJSIE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

PYLORI-Screen to szybki test immunodiagnostyczny, który umożliwia wykrycie przeciwciał anty-Helicobacter pylori w krwi pobranej z nakłucia palca. Jest przeznaczony do samodzielnego użytku i pozwala szybko (wynik w ciągu 10 minut) i swoiście potwierdzić obecność tych przeciwciał, które są związane z infekcją najczęstszą przyczyną wrzodów żołądka. Helicobacter pylori, kolonizujący błonę śluzową żołądka lub jelita, może prowadzić do przewlekłego nieżytu żołądka, a w skrajnych przypadkach do owrzodzenia lub nowotworu.

Zastosowanie

Test z krwi do wykrywania przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori, bakterii będącej czynnikiem rozwoju wrzodów żołądka.

Sposób użycia

- Dokładnie umyj ręce mydłem, opłucz pod bieżącą czystą wodą i osusz.
- Rozewnij aluminiową torebkę wzdłuż krawędzi, a następnie wyjmij płytkę testową oraz plastikową pipetę. Połóż je na płaskiej powierzchni w zasięgu ręki (wyrzuć saszetkę z pochłaniaczem wilgoci).
- Przygotuj nakłuwacz: przekręć szarą nakrętkę, aż poczujesz, że oddziela się od nakłuwacza (nie ciągnij!); kontynuuj przekręcanie (2-3 obroty), zdejmij i wyrzuć nakrętkę (nie dotykaj przycisku uwalniającego).
- Zdezynfekuj opuszek wybranego palca dłoni i pomasuj 10-15 sekund w kierunku opuszka palca, aby zwiększyć ukrwienie.
- Dociśnij mocno nakłuwacz do bocznej strony zdezynfekowanego opuszka palca i naciśnij przycisk wysuwający lancet.
- Końcówka nakłuwacza schowa się automatycznie zapewniając bezpieczeństwo po jego użyciu.
- Delikatnie masuj nakłuty opuszek palca, aby uzyskać krople krwi.
- Nie uciskając pipety, zbliż jej końcówkę do kropli krwi; krew migruje przez kapilarę, aż do linii wyznaczonej na pipecie.
- Za pomocą masażu możesz uzyskać kolejną kroplę krwi, jeżeli linia na pipecie nie została osiągnięta. W miarę możliwości należy unikać wciągania do pipety pęcherzyków powietrza.
- Przenieś pobraną krew do dołka próbkowego płytki testowej poprzez ściśnięcie końcówki pipety.



- Poczekać 30-40 sekund, aż cała krew znajdzie się w dołku próbkowym.
- Odkręć niebieską nakrętkę i dodaj 4 krople diluentu do dołka próbkowego (w przerwach 2-3 sek. pomiędzy każdą kroplą; trzymaj diluent pionowo).
- Odczytaj wynik testu po upływie 10 minut (nie interpretuj wyniku testu po upływie 15 minut).

Ważne wskazówki

- Przed wykonaniem badania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
- Test jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie połykać.
- Test jednorazowego użytku.
- Test powinien pozostać w szczelnie zamkniętym opakowaniu do momentu użycia.
- Nie używaj saszetki z pochłaniaczem wilgoci.
- Przechowywać w temperaturze od 4°C do 30°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie zamrażać.

Producent

VEDA.LAB
Rue de l'Expansion
61000 Cerise, France