

Quixx, test ciążowy płytkowy, 1 sztuka

Cena: 7,74 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	GENEXO SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Quixx to domowy, jednostopniowy test ciążowy w formie płytki, służący do jakościowego oznaczania poziomu hormonu hCG w moczu. Test można przeprowadzić o dowolnej porze dnia w celu wstępnego wykrycia ciąży.

Działanie testu Quixx opiera się na wykrywaniu podwyższonego stężenia ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w próbce moczu kobiety, co może nastąpić już około 7-10 dni po zapłodnieniu.

Test Quixx można wykonać już w pierwszym dniu spodziewanej miesiączki, a w większości przypadków zapewnia on dokładne wyniki.

Zastosowanie

Oznaczanie podwyższonego stężenia hormonu hCG w moczu w celu wczesnego wykrywania ciąży.

Sposób użycia

- W celu otrzymania wyniku należy pobrać próbkę moczu do pojemnika dołączonego do zestawu.
- Preferowana jest próbka pierwszego, porannego moczu, ponieważ zazwyczaj zawiera ona najwyższe stężenie hCG.
- Jeżeli próbka nie może być zbadana od razu, może być przechowywana w temperaturze 2-8oC przez 72 h przed wykonaniem badania.
- Jeśli mocz zawiera widoczny osad, powinno się go odstawić do uzyskania przejrzystej próbki.
- Przy pomocy kroplomierza nabiera się kilka kropel moczu, a następnie umieszcza je na płytce umieszczonej na teście.
- Wynik można odczytać już po 5 minutach.
- Nie należy odczytywać wyniku po upływie 10 minut.
- Po jednokrotnym użyciu zestaw należy wyrzucić do pojemnika na śmieci.

Interpretacja wyników

Wynik dodatni

- Barwny prążek pojawia się zarówno w obszarze testowym T jak i w obszarze kontrolnym C.



- Pojawienie się 2 prążków oznacza ciążę i wymaga konsultacji lekarskiej.

Wynik ujemny

- Barwny prążek widoczny jest tylko w obszarze kontrolnym C, natomiast nie pojawia się w obszarze testowym T.
- Oznacza to brak ciąży.
- W przypadku, gdy wynik testu jest ujemny, ale nie pojawia się spodziewana miesięczka należy skonsultować się z lekarzem.

Wynik nieprawidłowy

- Barwny prążek nie pojawia się w obszarze testowym T ani w obszarze kontrolnym C lub czerwony prążek widoczny jest tylko w obszarze testowym T

Ważne wskazówki

- Wyłącznie do diagnostyki in vitro.
- Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użycia dołączoną do opakowania testu ciążowego Quixx.
- Test jest wyrobem medycznym jednokrotnego użytku.
- Oryginalne opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 4-30°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie narażać na działanie promieni słonecznych oraz wilgoci.

Producent

Genexo Sp z o.o.
ul. gen. Józefa Zajęczka 26
01-510 Warszawa