

Ranisilver, spray, 125 ml



Cena: 49,95 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	RANISILVER
Opakowanie	125 ml
Postać	Spray
Producent	KADEFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające, Ochronne, Regenerujące (odbudowujące), Ułatwiające gojenie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ranisilver to wyrób medyczny w postaci sprayu, który przywraca i utrzymuje optymalne nawodnienie skóry oraz wspomaga prawidłowy przebieg fizjologicznych procesów regeneracji tkanek.

Składniki

Kwas hialuronowy, fitokolagen akacjowy, srebro mikronizowane, witamina E, olej migdałowy, silikon, sól glinowa oktenylobursztynianu skrobiowego.

Zastosowanie

Wspomaganie leczenia:

- ran pooperacyjnych i ostrych, z zakażeniem lub bez zakażenia,
- ran przewlekłych (odleżyny, odparzenia, stopa cukrzycowa, odczyny popromienne),
- miejsc po interwencjach chirurgicznych (tracheotomia, dreny, cewniki),
- stanów po zabiegach proktologicznych (przetoki, żylaki odbytu),
- uszkodzenia naskórka (odczyny alergiczne, wysypka pieluszkowa, otarcia, zadrapania, podrażnienia skóry),
- pielęgnacja pępowiny,
- ran po cięciu cesarskim i nacięciu krocza.

Sposób użycia

- Oczyszczyć ranę sterylnym roztworem soli fizjologicznej.
- Trzymając pojemnik w pionie, naciśnij zawór dozujący i rozpyl spray na uszkodzoną skórę.
- Aplikuj 2-3 razy dziennie tworząc cienką warstwę proszku na powierzchni rany.
- Stosuj aż do całkowitego wyleczenia.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub pokrewne substancje chemiczne.
- Uszkodzenia skórne innych niż powierzchowne.
- W okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 3 roku życia produkt może być aplikowany wyłącznie w razie rzeczywistej potrzeby i pod bezpośrednią kontrolą lekarza.

Ostrzeżenia

- Nie stosować do celów innych niż przewidziane.
- Długotrwałe używanie wyrobu medycznego może wywoływać reakcje nadwrażliwości lub podrażnienia. Wówczas należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować na rany obejmujące tkankę podskórną.
- Zaleca się unikanie stosowania sprayu Ranisilver z innymi wyrobami medycznymi o działaniu miejscowym. Dopuszcza się tego rodzaju stosowanie wyłącznie w razie rzeczywistej potrzeby i pod nadzorem lekarza.
- Nie używać produktu po upływie daty ważności.
- Nie używać jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
- Pojemnik pod ciśnieniem — podgrzanie może skutkować wybuchem.
- Nie palić.
- Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
- Nie przekłuwać ani nie podpalać pojemnika nawet po zużyciu.

Ważne wskazówki

- Wyrób medyczny przeznaczony jest do użytku zewnętrznego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
- Chronić przed światłem słonecznym.
- Przechowywać w temperaturze niższej niż 30°C, w suchym miejscu.
- Unikać kontaktu z oczami. W przypadku przypadkowego kontaktu z oczami spłukać obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.
- W przypadku wystąpienia działania niepożądanego w czasie stosowania sprayu Ranisilver należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent

SAKURA ITALIA SRL