

ReaTape - taśma kinezyjologiczna Classic, beż, 1 sztuka



Cena: 27,52 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Taśma kinezyjologiczna
Producent	313 SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Taśma kinezyjologiczna znajduje zastosowanie w różnorodnych dziedzinach fizjoterapii, takich jak terapia bólu, ortopedia, neurologia, rehabilitacja pooperacyjna, onkologia, medycyna sportowa oraz pediatria. Odpowiednio zaaplikowane plastry wspierają korekcję postawy ciała, a także pomagają łagodzić dolegliwości bólowe zarówno u pacjentów, jak i osób aktywnych fizycznie.

Zastosowanie

Wspieranie procesów leczniczych i wydolnościowych organizmu poprzez oddziaływanie 24 godziny na dobę.

Sposób użycia

Taśmę aplikuj na czystą i osuszoną powierzchnię skóry. W przypadku obfitego owłosienia zaleca się jego usunięcie. Wyjmij taśmę z opakowania, rozwiń i za pomocą nożyczek utnij pożądaną długość i kształt. Aby zapobiec odklejaniu się taśmy od skóry, zaokrąglaj jej końce. Ostrożnie odklej foliowe zabezpieczenie warstwy klejącej. Przed przyklejeniem taśmy do skóry upewnij się, że strona klejąca taśmy nie miała styczności z żadną inną powierzchnią. Przyklej taśmę w odpowiednie miejsce na ciele.

Właściwości

- Kinesiology taping to metoda zmniejszania bólu i nienaturalnych odczuć skóry i mięśni. Taping niweluje obrzęki i poprawia krążenie krwi.
- Rea Tape idealnie nadaje się do stosowania na obszarze całego ciała, można stosować ją do wszystkich popularnych sposobach kinesiotalingu.
- Kinesiotaping stosowany jest w wielu kręgach medycyny m.in. w rehabilitacji, ortopedii, pediatrii czy reumatologii, a także podczas sportów amatorskich i wyczynowych.
- Kinesiotaping to metoda plastrowania, która ma znaczący wpływ na proces leczenia.
- Taping wpływa na obrzęki i zastoje limfy.
- Metoda tejpowania może być stosowana u osób wrażliwych. Wykonane są z tkaniny bawełnianej oraz warstwy akrylowej pokrytej mało drażniącym klejem.
- Taśmy nie zawierają lateksu oraz substancji leczniczych, są elastyczne (130-140%), przepuszczalne dla powietrza i hipoalergiczne.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

NOVAMED

ul. Traktorowa 196, 91-218 Łódź.