

Remo-Wax, krople do uszu, 10 ml + gumowa gruszka

Cena: 24,47 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	REMO-WAX
Opakowanie	10 ml (+ gumowa gruszka)
Postać	Krople
Producent	ORION CORPORATION
Przeznaczenie	Higiena uszu
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Remo-Wax to specjalistyczny produkt w postaci kropli, przeznaczony do skutecznego i bezpiecznego czyszczenia uszu. Ten wyrób medyczny został stworzony specjalnie do usuwania nadmiaru woskowiny, rozpuszczania korków woskowinowych oraz zapobiegania ich powstawaniu.

Preparat zawiera w swoim składzie wysoko oczyszczoną pochodną lanoliny oraz inne składniki zmiękczające, które po aplikacji penetrują woskowinę, ułatwiając jej łatwiejsze wypłukanie z ucha zewnętrznego. Dołączona gruszka pozwala na precyzyjne płukanie ucha w celu usunięcia rozpuszczonej woskowiny.

Składniki

Alantoina, lanolina etoksylowana, polisorbát 80, polisorbát 60, polimer sorbitolu, syrop fruktozowy, eter polioksyetyleno-staerylowy, eter polioksyetylo-oleinowy, lanolina ciekła, mirystynian izopropylu, olej z tłuszczu nerek, alkohol fenyletylowy, alkohol cetylowy, butylowany hydroksytoluen, kwas sorbowy, chlorek benzetonowy, woda.

Zastosowanie

Usuwanie woskowiny usznej u dorosłych oraz dzieci.

Sposób użycia

Rozpuszczanie korka woskowinowego:

- ogrzać zawartość butelki z kroplami w dłoni do temperatury ok. 37°C),
- przechylić głowę w kierunku barku lub położyć się z głową zwróconą w bok i zaaplikować do ucha 10-20 kropli,
- kilkakrotnie pociągnąć delikatnie płatek ucha w górę i w dół, wykonując ruch obrotowy,
- można wprowadzić do ucha mały tampon z bawełny zwilżony kilkoma kroplami Remo-Wax i pozostawić przez 20-60 minut (w razie potrzeby tampon można pozostawić w uchu na noc).

Przepłukanie przewodu słuchowego:

- po użyciu kropli przewód słuchowy musi zostać przepłukany, najlepiej przy użyciu gumowej gruszki (zaleca się, aby płukanie było wykonane przez lekarza lub pielęgniarkę środowiskową),
- aby samodzielnie wykonać płukanie ucha, należy nabrać do gruszki wody o temperaturze ok. 37°C,
- wsunąć ostrożnie końcówkę gruszki do kanału słuchowego na głębokość kilku milimetrów i płucać ucho, ściskając lekko gruszkę,
- nie należy wprowadzać gruszki w głąb przewodu słuchowego,
- powtórzyć płukanie kilka razy aż woda wypływająca z ucha będzie zupełnie czysta.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość lub alergia na którykolwiek składnik preparatu: Jeśli masz znaną nadwrażliwość lub alergię na którykolwiek ze składników znajdujących się w Remo-Wax, powinieneś unikać jego stosowania i skonsultować się z lekarzem w celu znalezienia alternatywnego rozwiązania.
- Stany zapalne lub ból ucha: Jeżeli masz stany zapalne ucha lub odczuwasz ból, nie powinieneś stosować Remo-Wax bez wcześniejszej oceny lekarza. W takiej sytuacji ważne jest skonsultowanie się z profesjonalistą, który oceni przyczynę bólu lub stanu zapalnego ucha i zaleci odpowiednie postępowanie.
- Wydzielina z ucha: Jeśli zauważasz obecność wydzieliny lub płynu z ucha, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem przed zastosowaniem Remo-Wax. Wydzielina może wskazywać na obecność infekcji lub innych problemów, które wymagają profesjonalnej oceny i leczenia.
- Uszkodzona, przedziurawiona lub przebita błona bębenkowa: W przypadku obecności uszkodzenia błony bębenkowej, na przykład z powodu drenu po nakłuciu, należy powstrzymać się od stosowania Remo-Wax. Istnieje ryzyko, że preparat może dostawać się do ucha środkowego i pogorszyć stan lub spowodować powikłania. W takiej sytuacji ważne jest skonsultowanie się z lekarzem otolaryngologiem, który podejmie odpowiednie działania.

Dodatkowe informacje

Stosowanie wyrobu medycznego Remo-Wax u małych dzieci powinno być skonsultowane z lekarzem. Dzieci, zwłaszcza niemowlęta i małe dzieci, mogą mieć wrażliwe uszy i układ słuchowy, dlatego ważne jest uzyskanie porady lekarskiej przed zastosowaniem jakichkolwiek produktów do czyszczenia uszu u dzieci.

Przechowywanie Remo-Waxu w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci jest ważne, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu lub nieodpowiedniemu użyciu przez dzieci. Preparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C zgodnie z zaleceniami producenta.

Ważne jest również nie używanie Remo-Waxu po upływie daty ważności. Data ważności informuje o okresie, w którym produkt jest bezpieczny i skuteczny. Po upływie daty ważności składniki preparatu mogą ulec degradacji lub zmianie, co może wpływać na jego jakość i skuteczność. Dlatego zawsze należy używać produktu przed datą ważności i nie stosować go po tym terminie.

Producent

ORION CORPORATION/ORION OYJ
Orionintie 1
FI-02200 Espoo, Finlandia
office@orion.fi