

Respimer Netiflow, saszetki do płukania nosa i zatok, 30 saszetek

Cena: 34,25 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 saszetek
Postać	Proszek
Producent	QPHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Oczyszczające, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Respimer Netiflow to wyrób medyczny w postaci saszetek z proszkiem do sporządzania roztworu do irygacji nosa i zatok. Przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia. Produkt stanowi uzupełnienie zestawu do płukania i służy do oczyszczania jamy nosowej, udrażniania zatok oraz łagodzenia podrażnień błon śluzowych układu oddechowego.

Wskazania

Respimer Netiflow stosowany jest w przypadku:

- nieżyty nosa,
- alergii,
- zapalenia zatok i nosa,
- pielęgnacji po operacjach chirurgicznych,
- ogólnej higieny nosa.

Działanie

Wyrób medyczny Respimer Netiflow:

- rozluźnia śluz i usuwa wszelkie rodzaje wydzieliny, skrzepów i czynników zakaźnych,
- zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa i ucisk w zatokach (dzięki ciśnieniu osmotycznemu),
- pomaga zmniejszyć konieczność leczenia farmakologicznego w przypadku zapalenia nosa i zatok oraz alergicznego nieżyty nosa,
- wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów obronnych układu oddechowego.

Skład

Saszetka jednorazowego użycia:

- związek o jakości farmaceutycznej złożony z 5 soli mineralnych (chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, wodorowęglan sodowy),
- kompozycja mineralna tworząca roztwór zbliżony do płynu pozakomórkowego.

Sposób użycia

- Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki.
- Możliwe jest przeprowadzenie irygacji łagodnej (grawitacyjnej) lub intensywnej (wykorzystującej ciśnienie ręczne).
- W przypadku nieżyty nosa, zapalenia zatok, przewlekłego zapalenia nosa i zatok oraz do pielęgnacji po operacjach chirurgicznych: rozpuszczając 1 saszetkę w ok. 240 ml niegazowanej wody mineralnej otrzymujemy zbuforowany roztwór izotoniczny. W przypadku choroby lub do pielęgnacji po operacjach chirurgicznych stosować od 1 do 3 irygacji dziennie, a w przypadku ogólnej higieny stosować od 2 do 3 irygacji tygodniowo.
- W razie potrzeby, w przypadku ciężkich objawów: rozpuszczając 2 saszetki w ok. 240 ml niegazowanej wody mineralnej otrzymujemy zbuforowany roztwór hipertoniczny. Stosować jedną irygację dziennie przez 3 do 5 dni.
- Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia: 1 saszetka dziennie.
- Stosować wraz z irygatorem Respimer Netiflow.

Przeciwwskazania

- Nie należy wykonywać irygacji samą niegazowaną wodą mineralną bez dodania zawartości saszetek Respimer Netiflow.
- W przypadku choroby (przeziębienie, zapalenie zatok lub zapalenie nosa i zatok), jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 10 dni, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku całkowitego zablokowania nosa, krwawienia z nosa, infekcji ucha, niedawno przebytej operacji ucha lub jeśli masz problemy z utrzymaniem równowagi.
- Wykonuj irygację co najmniej 1 godzinę przed wyjściem na zimne powietrze (ryzyko zapalenia błony śluzowej nosa).
- Zastosuj saszetkę bezpośrednio po otwarciu.
- 1 irygator może być stosowany wyłącznie przez 1 osobę.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać saszetek po upływie terminu ważności.
- Nie używać, jeśli opakowanie straciło swój pierwotny wygląd.

Uwagi

Może być używany w przypadku astmy, alergicznego nieżyty nosa i mukowiscydozy w celu utrzymania higieny nosa oraz w przypadku przewlekłego zapalenia zatok przynosowych.

Producent

LABORATOIRE DE LA MER
Rue du Général Patton
Saint-Malo, Francja