

Respimer Netiflow, zestaw do płukania nosa i zatok, 1 urygator + 6 saszetek

Cena: 47,59 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	6 saszetek (+ urygator)
Postać	Zestaw
Producent	QPHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Oczyszczające, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Respimer Netiflow to wyrób medyczny przeznaczony do skutecznego płukania nosa i zatok, odpowiedni dla dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia. Zestaw zawiera urygator oraz 6 saszetek z kompleksem soli mineralnych, które po rozpuszczeniu tworzą roztwór oczyszczający jamę nosową i łagodzący podrażnienia błon śluzowych układu oddechowego.

Wskazania

Respimer Netiflow stosowany jest w przypadku:

- nieżyty nosa,
- alergii,
- zapalenia zatok i nosa,
- pielęgnacji po operacjach chirurgicznych,
- ogólnej higieny nosa.

Działanie

Wyrób medyczny Respimer Netiflow:

- rozluźnia śluz i usuwa wszelkie rodzaje wydzieliny, skrzepów i czynników zakaźnych,
- zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa i ucisk w zatokach (dzięki ciśnieniu osmotycznemu),
- pomaga zmniejszyć konieczność leczenia farmakologicznego w przypadku zapalenia nosa i zatok oraz alergicznego nieżyty nosa,
- wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów obronnych układu oddechowego.

Skład



Saszetka jednorazowego użycia:

- związek o jakości farmaceutycznej złożony z 5 soli mineralnych (chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, wodorowęglan sodowy),
- kompozycja mineralna tworząca roztwór zbliżony do płynu pozakomórkowego.

Sposób użycia

- Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki.
- Możliwe jest przeprowadzenie irygacji łagodnej (grawitacyjnej) lub intensywnej (wykorzystującej ciśnienie ręczne).
- W przypadku nieżytu nosa, zapalenia zatok, przewlekłego zapalenia nosa i zatok oraz do pielęgnacji po operacjach chirurgicznych: rozpuszczając 1 saszetkę w ok. 240 ml niegazowanej wody mineralnej otrzymujemy zbuforowany roztwór izotoniczny. W przypadku choroby lub do pielęgnacji po operacjach chirurgicznych stosować od 1 do 3 irygacji dziennie, a w przypadku ogólnej higieny stosować od 2 do 3 irygacji tygodniowo.
- W razie potrzeby, w przypadku ciężkich objawów: rozpuszczając 2 saszetki w ok. 240 ml niegazowanej wody mineralnej otrzymujemy zbuforowany roztwór hipertoniczny. Stosować jedną irygację dziennie przez 3 do 5 dni.
- Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia: 1 saszetka dziennie.

Przeciwwskazania

- Nie należy wykonywać irygacji samą niegazowaną wodą mineralną bez dodania zawartości saszetek Respimer Netiflow.
- W przypadku choroby (przeziębienie, zapalenie zatok lub zapalenie nosa i zatok), jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 10 dni, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku całkowitego zablokowania nosa, krwawienia z nosa, infekcji ucha, niedawno przebytej operacji ucha lub jeśli masz problemy z utrzymaniem równowagi.
- Wykonuj irygację co najmniej 1 godzinę przed wyjściem na zimne powietrze (ryzyko zapalenia błony śluzowej nosa).
- Zastosuj saszetkę bezpośrednio po otwarciu.
- 1 irygator może być stosowany wyłącznie przez 1 osobę.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać saszetek po upływie terminu ważności.
- Nie używać, jeśli opakowanie straciło swój pierwotny wygląd.

Uwagi

Może być używany w przypadku astmy, alergicznego nieżytu nosa i mukowiscydozy w celu utrzymania higieny nosa oraz w przypadku przewlekłego zapalenia zatok przynosowych.

Producent

LABORATOIRE DE LA MER
Rue du Général Patton
Saint-Malo, Francja