

Romed, ciśnieniomierz mechaniczny + stetoskop

Cena: 74,32 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	ciśnieniomierz
Producent	MEDIMED S.C. DAGMARA KOPEĆ, PIOTR KOPEĆ
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Mechaniczny ciśnieniomierz **Romed** to klasyczny aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia krwi. Jest szczególnie zalecany do regularnego monitorowania ciśnienia tętniczego, zwłaszcza u osób, które mają takie wskazania lekarskie.

Sposób użycia

Przed pomiarem:

- Unikać jedzenia, palenia, jak również wszelkich form wysiłku fizycznego bezpośrednio przed pomiarem. Wszystkie te czynniki mają wpływ na wynik pomiaru. Znaleźć czas, by się odprężyć, np. siedząc spokojnie w fotelu, przez około dziesięć minut przed pomiarem
- Dokonywać pomiaru zawsze na tym samym ramieniu (zwykle lewym), trzymając je nieruchomo podczas pomiaru
- Jeżeli noszą państwo ubranie przylegające do ramienia, należy je zdjąć.
- Starać się przeprowadzać pomiar regularnie o tej samej porze, ponieważ ciśnienie zmienia się w ciągu dnia.

II. Pomiar:

- Podłączyć wężyk słuchawek do stetoskopu, który na stałe umocowany jest na wewnętrznej stronie mankietu.
- Założyć na uszy słuchawki
- Zaciśnąć ściśle opaskę na ramieniu lewej ręki powyżej stawu łokciowego w ten sposób, aby słuchawka znajdowała się nad tętnicą po wewnętrznej stronie ramienia
- Ramię powinno opierać się swobodnie i znajdować się na poziomie serca.
- Trzymając gruszkę w ręku zakręcić zawór zgodnie z ruchem wskazówek zegara i pompować powietrze aż opaska wypełni się, słuchając jednocześnie tętna.
- Po zaniku tętna zwiększyć ciśnienie o około 20-30 mmHg.
- Powoli odkręcić zaworek spuszczać w ten sposób powietrze i zwracać uwagę czy uderzenia tętna są już słyszalne,
- Przy pierwszym uderzeniu tętna należy odczytać wartość ciśnienia skurczowego.
- Nadal delikatnie spuszczać powietrze słuchając tętna i dokonać ponownie odczytu przy ostatnim słyszalnym uderzeniu. Jest to



APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

ciśnienie rozkurczowe.

- Odkręcić mocno nakrętkę zaworu, aby wypuścić całkowicie powietrze z opaski
- Zdjąć słuchawki i opaskę z ręki, włożyć do futerału.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ROMED