

ROTADENO-Screen, test na rotawirusy i adenowirusy, 1 sztuka

Cena: 51,18 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LABHOME
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	ZBADAJSIE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

ROTADENO-Screen to medyczny wyrób diagnostyczny, który umożliwia wykrycie rotawirusów i adenowirusów w próbkach kału. Te wirusy są kluczowymi czynnikami wywołującymi infekcje żołądkowo-jelitowe, szczególnie u dzieci oraz osób w podeszłym wieku.

Wskazania

Test wskazany jest do wykonania w przypadku występowania infekcji jelitowo-żołądkowych, objawiających się biegunką, bólami brzucha i wymiotami.

Sposób użycia

1. Wypróżnij się na papierową podkładkę do pobrania próbki.
2. Odkręć nakrętkę butelki z rozcieńczalnikiem, zanurz jej koniec w próbce kału i zakręć butelkę z rozcieńczalnikiem.
3. Dokładnie wstrząśnij butelką aby próbka kału się rozpuściła.
4. Nanieś po 5 kropli rozcieńczalnika z próbką na dołki testowe na płytce (zarówno na pole testowe dla rotawirusów, jak i dla adenowirusów).
5. Odczekaj 10 minut, następnie odczytaj wynik.

Ostrzeżenia

- Test jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie połykać.
- Przed wykonaniem testu zapoznaj się z instrukcją użytkowania. Wynik testu jest wiarygodny tylko wówczas, gdy instrukcja jest ściśle przestrzegana.



Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi pobierania próbek kału oraz czasu odczytu wyniku testu.

- Przechowywać w temperaturze od 4°C do 30°C. Nie zamrażać.
- Nie stosować po upływie terminu ważności (termin podany na opakowaniu) oraz w przypadku, gdy opakowanie testu jest uszkodzone.
- Rotadeno-Screen jest testem jednorazowego użytku.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Po użyciu wszystkie elementy mogą zostać wyrzucone.

Producent

VEDA.LAB
Rue de l'Expansion
61006 ALENCON Cedex
veda.lab@wanadoo.fr