

Salvequick Foot Care Medium Plastry na pęcherze i otarcia 6 sztuk

Cena: 21,09 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SALVEQUICK
Opakowanie	6 sztuk
Postać	Plastry
Producent	ORKLA CARE S.A.
Przeznaczenie	Pęcherze
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Salvequick, blister plaster Foot Care, plastry na pęcherze i otarcia, 6 szt.

Wskazania

Salvequick, plastry na pęcherze i otarcia są polecane do opatrywania pęcherzy na piętach.

Działanie

Salvequick, plastry na pęcherze i otarcia:

- Są wykonane z hydrokolidowego materiału,
- Przynoszą natychmiatową ulgę w bólu i ucisku,
- Przyspieszają gojenie,
- Pozwalają skórze oddychać,
- Mogą być stosowane profilaktycznie, aby zapobiegać powstawaniu pęcherzy.

Sposób użycia

- Obmyj pęcherz pod bieżącą wodą lub za pomocą środka do oczyszczania ran,
- Upewnij się, że skóra jest sucha i czysta, również od emulsji i olejków,
- Przyklej plaster tak, by pokrywał on pęcherz i przykleił się na skórze wokół niego
- Pozostaw plaster na pęcherzu aż do czasu, gdy sam się odklei.
- Plaster może pozostać na pęcherzu przez kilka dni; czas ten jest różny dla różnych osób.
- Po odklejeniu się plastra oczyść pęcherz i zastosuj nowy plaster. Powtarzaj, czynność, aż pęcherz się zagoi.
- Aby usunąć plaster na pęcherz należy: rozciągnąć go ostrożnie równoległe do skóry (nie należy ciągnąć w górę).



Ostrzeżenia

- Nie stosować na zainfekowane rany!
- Osoby chore na cukrzycę powinny skonsultować się z lekarzami przed zastosowaniem produktu.
- Nie należy przekłuwać pęcherzy. Zwiększa to ryzyko infekcji i może opóźnić gojenie.

Producent

CEDERROTH
Polna 21
Radzymin