

## Salvequick Foot Care Plastry na odciski 6 sztuk

Cena: 8,98 zł



### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SALVEQUICK
Opakowanie	6 sztuk
Postać	plaster
Producent	ORKLA CARE S.A.
Przeznaczenie	Odciski
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

### Opis produktu

#### Opis

Plastry **Salvequick Med Corn** Plaster to skuteczny środek do leczenia odcisków. Zawierają kwas salicylowy w stężeniu 40%, który działa łagodząco na odciski i zrogowacenia skóry, ułatwiając ich usunięcie. Plastry te posiadają opatrunek, który chroni skórę, zapobiega tarcu oraz zmniejsza ucisk, co przyczynia się do złagodzenia bólu i szybkiej ulgi.

#### Składniki

Folia polietylenowa, klej akrylowy, kwas salicylowy, azorubina. Jeden plaster zawiera 0,04 g kwasu salicylowego.

#### Zastosowanie

Plastry na odciski i zrogowacenia.

#### Sposób użycia

- Plaster należy zmieniać codziennie.
- Po czterech dniach rdzeń odcisku będzie można usunąć poprzez namoczenie stopy w gorącej wodzie z dodatkiem mydła lub soli.
- W razie potrzeby czynność powtórzyć.

#### Przeciwwskazania

- Osoby chorujące na cukrzycę, ze słabym krążeniem lub zaburzeniami czynności nerek powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia (np. zaczerwienienia, pieczenia) należy usunąć plaster i zaprzestać jego używania.
- Nie używać w przypadku nadwrażliwości na kwas salicylowy/salicylany.
- Nie stosować na rany lub uszkodzoną skórę.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943

- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w chłodnym miejscu.

**Producent**

ORKLA CARE S.A.  
ul. Polna 21  
05-250 Radzymin