

Salvequick Med Blister Resuce Mix 6, plastry na pęcherze, 6 sztuk

Cena: 32,24 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	6 sztuk
Postać	Plastry
Producent	ORKLA CARE S.A.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Salvequick Med Blister Rescue Mix to hydrożelowe plastry medyczne, przeznaczone do opatrywania pęcherzy na stopach, niezależnie od tego, czy są one nienaruszone, pęknięte czy zdarte. Plastry oferują ochronę 360° oraz nie przyklejają się do pęcherza, co ułatwia ich usunięcie.

Stosowanie

- Plaster może pozostać na ranie do momentu, aż sam się nie odklei, jednak nie dłużej niż 5 dni.
- Należy zmienić plaster jeśli opatrunek żelowy nasiąknie.

Przeznaczenie

Do stosowania na przebite lub nieprzebite pęcherze na stopach, przede wszystkim na piętach, a także w celu zapobiegania powstawaniu pęcherzy.

Sposób użycia

- Należy oczyścić skórę wokół pęcherza letnią wodą lub płynem do przemywania ran, a następnie ją dokładnie osuszyć.
- Rozerwać ochronną torebkę z plasterem.
- Usunąć papier ochronny z plastra.
- Ostrożnie przyłożyć plaster na środek pęcherza, wygładzić zagięcia, jeśli powstały. Następnie usunąć białą, złożoną zakładkę.
- Usunąć górną warstwę ochronną z tworzywa sztucznego.

Właściwości

Plaster chroni powierzchnię skóry w miejscu pęcherzy, zapewniając tym samym kompleksową ochronę na poziomie 360°. Jest dyskretny – jego transparentny kolor pozwala dostosować się do koloru skóry. Dwa rodzaje plastrów, znajdujących się w opakowaniu,



idealnie nadaje się na pęcherze na piętach i na palcach u stóp. Usuwanie opatrunków jest bezproblemowe i praktycznie bezbolesne.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Wyrób jednorazowy. Nie stosować ponownie.
- Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 30oC. Chronić przed wilgocią.

Uwagi

W przypadku osób cierpiących z powodu zaburzeń procesu gojenia (diabetyków, osób starszych) należy regularnie sprawdzać miejsce pęcherza! Nie stosować na krwiste lub głębokie, mocno krwawiące lub zainfekowane pęcherze.

Producent

ORKLA CARE S.A.
ul. Fabryczna 5a
00-446 Warszawa