

Salvequick Med Wart Plaster, plastry na kurczajki na stopach, 20 sztuk

Cena: 39,36 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 sztuk
Postać	Plastry
Producent	ORKLA CARE S.A.
Przeznaczenie	Brodawki / kurczajki
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ochronny plaster z kwasem salicylowym na kurczajki (brodawki) podeszwowe.

Działanie

- Brodawki (kurczajki) to niewielkie zmiany na skórze, powodowane zakażeniem wirusowym. Nielezione, mogą być przenoszone na inne osoby, lub rozprzestrzeniać się na inne partie ciała u tej samej osoby. Często występują na dłoniach i stopach.
- Dzięki wysokiemu stężeniu kwasu salicylowego, plastry na kurczajki Salvequick Med Wart Plasters pomagają usunąć brodawki i zmniejszyć ich rozprzestrzenianie się.
- Są łatwe w aplikacji, a ich stosowanie jest bezbolesne.

Skład

Pianka poliuretanowa, klej akrylowy, kwas salicylowy i azorubina.

Sposób użycia

- Należy upewnić się, że skóra jest czysta i sucha.
- Rozpakować plaster i umieścić na kurczajce.
- Plastry należy zmieniać codziennie. Po usunięciu plastra, należy oczyścić kurczajkę za pomocą pilnika do paznokci lub pumeksu, by zeskrobać martwą tkankę.
- W razie potrzeby zabieg można powtarzać aż do usunięcia kurczajki, maksymalnie do 12 tygodni.

Ostrzeżenia

- W razie wątpliwości, czy schorzenie skóry jest kurczawką, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować na błonach śluzowych, w szczególności na oczach.
- Nie stosować produktu na rany, podrażnioną skórę, uszkodzoną skórę, ani na obszarach zaczerwienionych lub zainfekowanych.
- Jeśli w miejscu stosowania plastra pojawi się zaczerwienienie, podrażnienie, infekcja lub bolesność - zakończyć stosowanie, oczyścić skórę, przemywając obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować produktu jednocześnie z innymi środkami o działaniu keratolitycznym, takimi jak kwas salicylowy (na odciski), aby uniknąć kumulacji skutków.
- Nie stosować w razie nadwrażliwości na kwas salicylowy/salicylany. W razie wystąpienia reakcji alergicznej na skórze nie stosować ponownie.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie spożywać.
- Należy minimalizować kontakt ze zdrową skórą wokół kurczawki, aby zapobiec podrażnieniom.
- Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia ani u kobiet w ciąży bez zalecenia lekarza.
- Osoby chorujące na cukrzycę, ze słabym krążeniem lub zaburzeniami czynności nerek powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem plastra.
- Kwas salicylowy może zwiększyć przepuszczalność skóry, o czym należy brać pod uwagę, w przypadku stosowania leków o działaniu miejscowym.
- Plaster może być używany tylko przez jedną osobę, ponowne użycie tego samego plastra zwiększa ryzyko infekcji.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Jeśli kurczawka nie znika, zaprzestać stosowania produktu i zasięgnąć opinii lekarskiej.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent

ORKLA CARE S.A.
ul. Fabryczna 5a
00-446 Warszawa