

Sanity Flex, kompres żelowy w pokrowcu, standard, 10 cm x 26 cm, 1 sztuka

Cena: 30,27 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SANITY
Opakowanie	1 sztuka
Postać	kompres
Producent	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Chłodzące, Łagodzące, Rozgrzewające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Kompres **Sanity Flex Standard** to elastyczny okład żelowy przeznaczony do terapii ciepłem i zimnem. Jest używany do łagodzenia bólu i redukcji opuchlizn spowodowanych drobnymi urazami kolan, łokci i nadgarstków, jak również w przypadku bólu głowy, migren i skurczy. Produkt jest ceniony przez osoby preferujące terapie alternatywne. Może być stosowany wielokrotnie i łatwo dostosowuje się do potrzeb, można go chłodzić w zamrażarce lub podgrzewać w mikrofalówce lub gorącej wodzie. Kompres jest wyposażony w miękki pokrowiec z rzepem, który zapewnia ochronę skóry przed bezpośrednim kontaktem z żel. Jego wnętrze wypełniający jest żel, przyjazny dla środowiska, charakteryzujący się długotrwałym oddawaniem ciepła lub zimna. Kształt kompresu to prostokąt o wymiarach 10 cm x 26 cm, co czyni go bezpiecznym i wygodnym w użytkowaniu.

Zastosowanie

Zimne okłady

- pomagają w ostrych urazach, takich jak skręcenie stawu skokowego,
- łagodzą przewlekłe bóle spowodowane urazami układu mięśniowo-szkieletowego,
- zmniejszają obrzęki, stany zapalne i ból.

Ciepłe okłady

- leczą przewlekły ból mięśniowo-szkieletowy,
- łagodzą ból,
- redukują skurcze mięśni (np. ból pleców, bóle menstruacyjne),
- reumatoidalne zapalenie stawów i bóle stawów.



Sposób użycia

- Zimne okłady: Kompres należy umieścić w zamrażarce na minimum 2 godziny (>2 godziny, temp. -18°C).
- Ciepłe okłady: Kompres podgrzać w mikrofalówce (moc 300W) przez około 4 minuty w temperaturze rozmrażania lub zanurzyć go w gorącej wodzie na około 4-5 minut. Następnie osuszyć, włożyć okład do ochronnego pokrowca, a następnie zastosować na ciało.

Właściwości

- Uniwersalny rozmiar i format prostokąta o wymiarach 10 cm × 26 cm,
- Długi czas oddawania ciepła i zimna,
- Bezpieczny i wygodny w stosowaniu,
- Wielofunkcyjny (zimne i ciepłe okłady),
- Możliwość stosowania na wszystkie obszary ciała,
- Zachowuje elastyczność przy temperaturze do -18°C,
- Wielokrotne użytkowanie,
- Brak toksycznych substancji.

Ostrzeżenia

- Nie wolno kłaść kompresu bezpośrednio na skórę. Przed użyciem kompres należy włożyć do ochronnego pokrowca dołączonego do produktu.
- Jeżeli nie ma pokrowca, owinąć go czystym materiałem.

Ważne wskazówki

- Przed użyciem upewnij się, że kompres nie jest uszkodzony i sprawdź temperaturę kompresu.
- Staraj się nie uszkodzić skóry podczas stosowania (chodzi np. o odmrożenie, zamrożenie czy poparzenie skóry). Dzieci oraz osoby niepełnosprawne lub upośledzone powinny stosować kompres wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie należy stosować kompresu bezpośrednio na rany.
- Jeżeli zaczniesz odczuwać dyskomfort, bezzwłocznie zdejmij kompres z ciała.
- Podczas wyjmowania kompresu z kuchenki mikrofalowej lub z kąpieli wodnej zachowaj należyłą ostrożność. Zbyt mocne podgrzanie kompresu może doprowadzić do uszkodzenia folii ochronnej i do urazów skóry.
- Kompres nie jest zabawką. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie podgrzewaj kompresu w piekarniku ani opiekaczu.
- Kontroluj proces podgrzewania kompresu. Jeżeli kompres napęcza się powietrzem, niezwłocznie przerwij proces podgrzewania. Po ostygnięciu kompresu sprawdź jego szczelność i wybierz krótszy czas podgrzewania.
- Nie używaj ponownie kompresu, który przecieka. Taki kompres wyrzuć do pojemnika z odpadami domowymi.
- W przypadku zabrudzenia kompresu wyczyść go wilgotną szmatką.
- Przechowuj kompres w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w chłodnym i suchym miejscu.
- Nie wystawiaj kompresu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Producent

Albert Polska SP. z o.o.
ul. Obwodowa 4a
32-410 Dobrzyce