

Sanity, gumowy termofor w pokrowcu z hipopotamem, 0,7 l, 1 sztuka

Cena: 39,98 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Termofor
Producent	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Rozgrzewające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Sanity to termofor wykonany z gumy, umieszczony w miękkim, pluszowym pokrowcu w kształcie hipopotama o pojemności 0,7 litra. Doskonale nadaje się do profilaktyki i terapii – zapewnia miejscowe ogrzewanie ciała oraz łagodzi dolegliwości bólowe. Pokrowiec przypominający zabawkę nie tylko dodaje uroku, ale też zapewnia przyjemność podczas użytkowania. Termofor wyróżnia się trwałym utrzymywaniem ciepła oraz bardzo dobrą szczelnością.

Skład

Pokrowiec termoforu jest wykonany z poliestru. Należy go prać ręcznie, w temperaturze 30°C używając mydła i wody. Gumowy termofor czyścić wodą z mydłem, nie stosując środków dezynfekcyjnych.

Przeznaczenie

Znajduje zastosowanie w bólach brzucha, bólach mięśniowych i reumatycznych, u niemowląt i dzieci, gdy wystąpi kolka, a także przy przeziębieniu i grypie. Łagodzi objawy zapalenia stawów, zapalenia ucha, problemów z krążeniem, bólów żołądkowych, schorzeń układu moczowego, skurczów mięśni gładkich, przepukliny oraz bólów zębów.

Sposób użycia

- Przygotuj ciepłą wodę o temperaturze ok. 50° (nie wrzątek, który mógłby wywołać oparzenie).
- Odkręć zakrętkę i powoli napełnij wodą do $\frac{3}{4}$ objętości termoforu. Podczas napełniania uważnie trzymaj termofor w pozycji pionowej, za szyjkę.
- Pozbądź się nadmiaru powietrza, poprzez powolne przechylenie termoforu, aż do momentu, w którym w jego wylocie będzie widoczna woda. Dla wygody możesz oprzeć termofor na płaskiej powierzchni.
- Zakręć dokładnie kurek i sprawdź jego szczelność ostrożnie odwracając termofor do dołu. Jeśli jest szczelny załóż pokrowiec.
- Po użyciu wylej wodę, a termofor umieść wlewem do dołu, tak aby mógł wyschnąć. Przechowuj bez zakręcania korka w suchym,



ciemnym i chłodnym miejscu.

Uwagi

Chroń termofor przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Nie dopuszczaj do kontaktu z urządzeniami grzewczymi i nie przechowuj w wysokiej temperaturze lub na słońcu. Nie dopuszczaj do bezpośredniego, długotrwałego kontaktu termoforu ze skórą. Nie obciążaj ani nie naciskaj termoforu gdy jest wypełniony wodą. Nie siadaj na nim, nie kładź ciężkich przedmiotów. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów wewnątrz termoforu ani na nim. Za każdym razem, przed użyciem termoforu sprawdź go pod kątem zużycia lub uszkodzeń mechanicznych. Przy uszkodzeniu jakiegokolwiek elementu, należy wyrzucić cały wyrób w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Producent

ALBERT POLSKA
Obwodowa 4a
32-410 Dobczyce
albertpolska@albert.com.pl