

Sanity Standard, wlewnik gumowy, 2 l, 1 sztuka

Cena: 50,05 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Wlewnik
Producent	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Sanity Standard wlewnik gumowy to wielorazowy wyrób medyczny przeznaczony do oczyszczania jelita grubego oraz irygacji okolic intymnych u kobiet. Produkt charakteryzuje się bezpieczeństwem i wygodą użytkowania, a jego pojemność wynosi 2 litry.

Wskazania

Wyrób wskazany do zastosowania m.in. w przypadku: przygotowania do badania jelita grubego, przed zabiegami chirurgicznymi, dopochwowo, w celu oczyszczania.

Przeznaczenie

Wyrób medyczny Sanity Standard przeznaczony jest do irygacji pochwy lub lewatywy doodbytniczej.

Sposób użycia

- Użycie wlewnika i rodzaj zastosowanego płynu należy zawsze skonsultować z lekarzem. Stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed użyciem należy wlewnik dokładnie umyć wodą z mydłem i wyparzyć.
- Jeżeli nie występują przeciwwskazania, każdy człowiek w wieku od 8 lat może poddać się zabiegowi hydrokolonoterapii. Jednak efekty zabiegów będą lepsze, jeżeli przez 3 do 5 dni przed zabiegiem zastosujemy dietę lekkostrawną i bogatą w błonnik, aby ułatwić proces oczyszczania okrężnicy.
- W tym okresie zaleca się unikanie białka zwierzęcego oraz pokarmów, które pozostając na ścianach jelit powodują wzdęcia czy gazy, utrudniając przeprowadzenie zabiegu (produkty mączne czy mleczne). Należy przyjmować dużo płynów, jeść jak najwięcej warzyw, zwłaszcza zielonych, wskazane są też kasze.
- Bezpośrednio po zabiegu należy pić dużo płynów i w ciągu pierwszych sześciu godzin jeść wyłącznie świeże warzywa oraz owoce.
- W jelitach zwiększa się ilość prawidłowej flory bakteryjnej jelit, jednakże korzystne jest pobudzenie odbudowy tej mikroflory przez podawanie probiotyków przez kilka dni po zabiegu.
- W celu odniesienia trwałych korzyści z zabiegu zaleca się dostosowanie diety do indywidualnego fenotypu tzw. dieta metaboliczna, dbanie o właściwą podaż płynów i zwiększenie aktywności fizycznej.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Ostrzeżenia

- Nie używać uszkodzonego wlewnika. W razie ewentualnego uszkodzenia któregoś z elementów wlewnika, zniszczyć i wyrzucić wlewnik.
- Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent

ALBERT POLSKA
Obwodowa 4a
32-410 Dobczyce
albertpolska@albert.com.pl