

Sanity, termofor gumowy, 2 l, 1 sztuka

Cena: 14,89 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Termofor
Producent	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Rozgrzewające, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Termofor Sanity to wyrób medyczny przeznaczony do terapeutycznego lub profilaktycznego ogrzewania ciała oraz łagodzenia bólu. Został wykonany z wysokiej jakości naturalnej gumy, zapewniającej trwałość i komfort użytkowania.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do ogrzewania ciała w celu łagodzenia bólu lub kojenia napiętych mięśni. Sprawdzi się podczas zbijania gorączki, relaksacji napiętych mięśni lub stanach bólowych różnego typu np. przy bólu brzucha.

Sposób użycia

1. Trzymać termofor za szyjkę w pozycji pionowej napełnić go powoli wodą o temperaturze 50°C do $\frac{3}{4}$ objętości.
2. Wypuścić nadmiar powietrza pochylając termofor powoli nad płaską powierzchnią do momentu, aż w wylocie pojawi się woda.
3. Zakręcić korek i sprawdzić szczelność.
4. Po użyciu wylać wodę i powiesić wlewem w dół do całkowitego wysuszenia.

Przeciwwskazania

- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Nie podgrzewać w kuchenie mikrofalowej.
- Nie należy obciążać wypełnionego wodą termofora np. poprzez siadanie na nim, przyciskanie ciężkimi przedmiotami.
- Należy unikać długiego, bezpośredniego kontaktu produktu bez pokrowca ze skórą.
- Nie stosować środków dezynfekujących, w razie konieczności przemyć wodą z mydłem.

Ostrzeżenia

- Przechowywać bez korka w suchym i ciemnym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Wlewanie wody o temperaturze powyżej 70°C znacząco skraca żywotność termoforu, może powodować jego uszkodzenie, a w



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

konsekwencji oparzenia.

- W przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy wyrzucić cały wyrób.

Producent

ALBERT POLSKA

Obwodowa 4a

32-410 Dobczyce

albertpolska@albert.com.pl