

Sanity, termofor gumowy w pokrowcu, 2 L



Cena: 45,07 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Termofor
Producent	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Rozgrzewające, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Termofor **Sanity** to produkt wykonany z naturalnej gumy o ryflowanych ściankach, zapewniającej wysoką jakość i dobrą termikę. Pokrowiec wykonany z przyjemnego dla skóry materiału dodatkowo zwiększa komfort użytkowania.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Dedykowany do łagodzenia bólu, ogrzewania ciała w trakcie stanów chorobowych.

Sposób użycia

- Podgrzej wodę do temperatury około 50°C.
- Do termoforu nie należy wlewać wrzątku bądź wody w temperaturze, która mogłaby wywołać oparzenia.
- Odkręć nakrętkę, powoli napełnij termofor wodą do $\frac{3}{4}$ jego objętości. W trakcie napełniania trzymaj termofor za szyjkę w pozycji pionowej.
- Pozbądź się nadmiaru powietrza – pochyl termofor, aż do momentu, w którym w jego wylocie pojawi się woda. Dla wygody możesz oprzeć produkt na płaskiej powierzchni.
- Zakręć dokładnie kurek i sprawdź szczelność termoforu, odwracając go w dół. Następnie załóż pokrowiec.
- Po użyciu wylej wodę i powieś termofor wlewnem do dołu w celu osuszenia.

Ostrzeżenia

- Stosowanie w termoforze wody o temperaturze powyżej 70°C skraca żywotność produktu. Zbyt wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie produktu i oparzenie użytkownika.
- Termoforu nie należy podgrzewać w kuchence mikrofalowej.

Ważne wskazówki

- Termofor może być używany przez dzieci zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.



- Unikaj długiego, bezpośredniego kontaktu ze skórą, gdy termofor nie ma nałożonego pokrowca.
- Nie obciążaj termoforu, gdy jest on napętniony wodą.
- Nie siadaj na termoforze, nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.
- Przechowuj bez zakręcania korka w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu.
- Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Unikaj kontaktu z urządzeniami grzewczymi i przechowywania w wysokiej temperaturze lub na słońcu.
- Przed każdym użyciem sprawdź termofor pod kątem uszkodzeń mechanicznych i szczelności.
- Czyszczenie: pokrowiec wykonany jest z poliestru. W razie jego zabrudzenia prać ręcznie, używając mydła i wody o temperaturze 30°C. Termofor gumowy

przemywać wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących.

Producent

ALBERT Polska Sp. z o. o
ul. Obwodowa 4A
32-410 Dobczyce