

Sea-Band, opaska akupresurowa przeciw mdłościom dla dzieci, różowa, 1 para



Cena: 45,39 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	2 sztuki
Postać	opaska
Producent	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Choroba lokomocyjna
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dziecka

Opis produktu

Opis

Opaska Sea-Band dla dzieci to medyczne rozwiązanie służące łagodzeniu nudności. Jej skuteczność opiera się na technice ucisku punktu akupresurowego Nei-Kuan, który znajduje się na nadgarstku. Dzięki temu pomagają redukować uczucie mdłości, zarówno te związane z chorobą lokomocyjną, jak i wynikające z innych przyczyn.

Wskazania

Wyrób medyczny może być stosowany przez osoby dorosłe i dzieci od 3. roku życia, które cierpią na nudności związane z chorobą lokomocyjną lub nudności o innym podłożu (np. migrenowe).

Opaska jest produktem wielokrotnego użycia.

Działanie

Opaski pozwalają zminimalizować objawy choroby lokomocyjnej a także mdłości o różnym podłożu. Ich działanie opiera się na akupresurze punktu P6 (zwanego inaczej punktem Nei-Kuan) umieszczonego na nadgarstkach. Produkt rozpoczyna swe działanie 2-5 minut po założeniu.

Stosowanie

Aby założyć opaskę należy umieścić trzy środkowe palce na wewnętrznej stronie nadgarstka, w taki sposób aby krawędź trzeciego z nich znajdowała się tuż poniżej linii nadgarstka. Punkt P6 znajduje się pod palcem wskazującym, pomiędzy dwoma ścięgnami nadgarstka. Należy założyć opaskę w taki sposób, aby guzik uciskający skierowany był w stronę nadgarstka dokładnie w punkcie P6. Tę samą czynność wykonać na drugim nadgarstku. Aby zapewnić optymalny efekt, należy zakładać opaski jednocześnie na obu nadgarstkach. Wyrób zakładać można przed rozpoczęciem podróży lub w jej trakcie.

Przeciwwskazania

- W razie pojawienia się opuchlizny natychmiast przerwać stosowanie wyrobu.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł światła i wilgoci, w sposób niedostępny dla dzieci.

Uwagi

Opaski Sea-Band mogą być używane wielokrotnie lub noszone stale, można je prać ręcznie przy użyciu mydła lub innego łagodnego detergentu.

Producent

Salus International sp. z o.o.
Pułaskiego 9
40-273 Katowice