

Sea-Band, opaska przeciw mdłościom, akupresurowa dla dorosłych, 2 sztuki



Cena: 49,47 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SEA-BAND
Opakowanie	2 sztuki
Postać	opaska
Producent	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Sea-Band to opaski akupresurowe dla dorosłych, które są wyrobem medycznym hamującym mdłości o różnym podłożu. Opakowanie zawiera 2 sztuki tych opasek.

Wskazania

- Choroba lokomocyjna z objawami m.in. nudności
- Nudności o innym podłożu (np. w czasie ciąży, po chemioterapii, migrenie)

Działanie

Opaski akupresurowe SEA-BAND dla dorosłych to wyrób medyczny hamujący objawy choroby lokomocyjnej i mdłości o innym podłożu np. poranne, nudności przy chemioterapii, migrenie, operacji chirurgicznych, laparoskopii.

- Działanie opasek oparte jest na akupresurze pkt P6 na nadgarstkach (zwanego punktem Nei-Kuan).
- Stosowanie opasek nie powoduje senności oraz innych skutków ubocznych.
- Opaski działają szybko (nawet po 2-5 min).

Skład

Akryl 64,2% Nylon 24,2% Elastan 11,6%

Sposób użycia

- Opaski Sea-Band mogą być używane wielokrotnie lub noszone stale, można je prać ręcznie przy użyciu mydła lub innego łagodnego detergentu



- Umieść trzy środkowe palce na wewnętrznej stronie nadgarstka tak, aby krawędź trzeciego palca znajdowała się tuż poniżej pierwszej linii nadgarstka. Punkt Nei-Kuan znajduje się pod pierwszym palcem (wskazującym) pomiędzy dwoma wyczuwalnymi ścięgnami nadgarstka.
- Załóż opaskę tak, aby guzik uciskający skierowany był w kierunku nadgarstka dokładnie w punkcie Nei-Kuan. Powtórz czynność na drugim nadgarstku. Aby zapewnić optymalny efekt, należy zakładać opaski jednocześnie na obu nadgarstkach. Opaski Sea-Band można założyć na nadgarstek przed rozpoczęciem podróży lub w jej trakcie.

Ostrzeżenia

W razie pojawienia się opuchlizny należy zdjąć opaski.

Producent

SEA BAND
Pułaskiego 9
Katowice