

Sea-Band, opaski akupresurowe przeciw mdłościom dla dzieci, niebieskie, 2 sztuki



Cena: 48,35 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	2 sztuki
Postać	bandaż
Producent	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące)
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dziecka, Od 3 lat

Opis produktu

Opis

Opaski Sea-Band są medycznym wyrobem przeznaczonym dla dzieci powyżej 3 roku życia, które hamują objawy choroby lokomocyjnej, takie jak mdłości i wymioty. Przeszły one kliniczne testy skuteczności. Ich mechanizm działania opiera się na akupresurze, zgodnie z tradycyjną chińską medycyną naturalną, gdzie uciskają punkt P6 (Nei-Kuan) między dwoma głównymi ścięgnami nadgarstka, co pomaga złagodzić symptomy choroby lokomocyjnej.

Efekty działania opasek mogą być odczuwalne już po kilku minutach od ich założenia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się zakładanie ich przed podróżą samochodem, samolotem lub statkiem. Mogą być również stosowane w trakcie podróży lub noszone stale, aby łagodzić mdłości po chemioterapii lub znieczuleniu ogólnym.

Opaski przeciw wymiotom nie powodują senności ani innych skutków ubocznych. Wykonane są z nylonowego włókna z dodatkiem elastyny, co czyni je wielokrotnego użytku i umożliwia pranie przy użyciu łagodnego detergentu.

Zastosowanie

Redukcja objawów choroby lokomocyjnej u dzieci powyżej 3 roku życia.

Sposób użycia

- Umieścić trzy środkowe palce na wewnętrznej stronie nadgarstka tak, aby krawędź trzeciego palca znajdowała się tuż poniżej pierwszej linii nadgarstka.
- Punkt Nei-Kuan znajduje się pod pierwszym palcem (wskazującym) pomiędzy dwoma wyczuwalnymi ścięgnami nadgarstka.
- Założyć opaskę tak, aby guzik uciskający skierowany był w kierunku nadgarstka dokładnie w punkcie Nei-Kuan.
- Powtórzyć czynność na drugim nadgarstku.
- Opaski SeaBand można założyć przed rozpoczęciem podróży lub w jej trakcie.

Właściwości



- Hamuje objawy choroby lokomocyjnej.
- Dla dzieci powyżej 3 lat.
- Działanie na zasadzie akupresury.
- Wielokrotnego użytku.
- Możliwość prania.
- Komfort stosowania.
- Nie powoduje efektów ubocznych.
- Szybkie działanie.
- Z najwyższej jakości materiałów.
- Przetestowane klinicznie.

Ostrzeżenia

W przypadku pojawienia się opuchlizny należy niezwłocznie zdjąć opaski.

Ważne wskazówki

- Opaski można prać ręcznie przy użyciu mydła lub innego delikatnego detergentu.
- Wyrób medyczny przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Producent

Sea-Band Limited
Hawley Road, Hinckley
Leicestershire LE10 0PR