

Sea-Band, opaski akupresurowe przeciw mdłościom dla dzieci, różowe, 2 sztuki

Cena: 47,18 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	2 sztuki
Postać	bandaż
Producent	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące)
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dziecka, Od 3 lat

Opis produktu

Opis

Opaski akupresurowe **Sea-Band** są przeznaczone dla dzieci powyżej 3 roku życia i są klasyfikowane jako wyroby medyczne. Służą one do łagodzenia objawów choroby lokomocyjnej, takich jak wymioty, mdłości oraz nudności spowodowane np. znieczuleniem ogólnym lub chemioterapią. Ich działanie opiera się na zasadzie akupresury, czyli ucisku odpowiedniego punktu na ciele.

Opaski zostały przetestowane klinicznie i posiadają wbudowany guzik, który uciska punkt Nei-Kuan znajdujący się między dwoma głównymi ścięgnami nadgarstka. Działanie przeciwdziałające wymiotom może być zauważalne już po kilku minutach od założenia opasek. Aby uzyskać najlepsze efekty, zaleca się zakładanie ich przed podróżą. Można również używać ich podczas podróży samochodem, lotem samolotem lub rejsami statkowymi.

Stosowanie opasek przeciw mdłościom u dzieci nie powoduje efektów ubocznych, takich jak senność. Opaski są przeznaczone do wielokrotnego użytku i można je prać przy użyciu łagodnego detergentu. Dzięki elastycznym włóknom zapewniają one wysoki komfort noszenia.

Zastosowanie

Redukcja objawów choroby lokomocyjnej u dzieci powyżej 3 roku życia.

Sposób użycia

- Umieścić trzy środkowe palce na wewnętrznej stronie nadgarstka tak, aby krawędź trzeciego palca znajdowała się tuż poniżej pierwszej linii nadgarstka.
- Pod pierwszym palcem (wskazującym) pomiędzy dwoma wyczuwalnymi ścięgnami nadgarstka znajduje się Punkt Nei-Kuan.
- Założyć opaskę tak, żeby guzik uciskający skierowany był w kierunku nadgarstka dokładnie w punkcie Nei-Kuan.
- W ten sam sposób założyć opaskę na drugi nadgarstek.
- Najlepiej założyć opaskę przed podróżą, możesz ją założyć także w jej trakcie.

Właściwości



- Dla dzieci powyżej 3 lat.
- Hamuje objawy choroby lokomocyjnej.
- Działanie poprzez ucisk (akupresura).
- Wielokrotnego użytku (możliwość prania).
- Komfort użytkowania.
- Bez efektów ubocznych.
- Szybkość działania.
- Z najwyższej jakości materiałów.
- Przetestowane klinicznie.

Ostrzeżenia

W przypadku pojawienia się opuchlizny należy niezwłocznie zdjąć opaski.

Ważne wskazówki

- Opaski przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 roku życia. Nie należy ich stosować u młodszych dzieci.
- Produkt można prać ręcznie z użyciem delikatnego detergentu np. mydła.

Producent

Sea-Band Limited
Hawley Road, Hinckley
Leicestershire LE10 0PR