

Seni Active Plus, majtki chłonne, rozmiar M, 10 sztuk

Cena: 43,20 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SENI
Opakowanie	10 sztuk
Postać	Majtki chłonne
Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
Przeznaczenie	Higiena, Nietrzymanie moczu
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Seni Active Plus to elastyczne majtki chłonne w rozmiarze M (10 sztuk) przeznaczone dla osób aktywnych oraz uczestników rehabilitacji ruchowej z umiarkowanym i ciężkim nietrzymaniem moczu. Zapewniają wygodę, doskonałe dopasowanie, cyrkulację powietrza oraz neutralizację zapachu moczu. Można je zakładać jak tradycyjną bieliznę, a ich zdejmowanie jest proste dzięki bocznym szwom, które łatwo się rozrywają. Dodatkowo posiadają wskaźnik wilgotności informujący o konieczności wymiany produktu. Mają najwyższy poziom chłonności w linii Seni Active – 7/7.

Działanie

- Elastyczne majtki chłonne Seni Active dają poczucie suchości dzięki włókninie rozpraszającej, która znajduje się we wkładzie chłonnym. Umożliwia ona szybsze i dokładniejsze rozprzescenie wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego.
- Anatomiczny kształt produktu oraz elastyczne osłonki boczne, które zostały wykonane z hydrofobowej włókniny sprzyjają odpowiedniemu dopasowaniu się wyrobu do ciała oraz zapobiegają przeciekaniu.
- Majtki chłonne zostały wykonane z materiału umożliwiającego swobodną cyrkulację powietrza, dzięki czemu zmniejszają prawdopodobieństwo powstawania podrażnień i odparzeń. Dodatkowo materiał nie szeleści gwarantując komfort i dyskrecję noszenia.
- Produkt został wyposażony w indykator wilgotności, w formie nadruku na majtkach, który informuje o stopniu napełnienia chłonnego wkładu, a tym samym o konieczności wymienienia produktu.
- Obecność superabsorbentu, nie tylko zwiększa właściwości chłonne produktu, ale również wykazuje właściwości antybakteryjne, hamując rozwój bakterii będących przyczyną przykrego zapachu.

Skład

Nie zawiera lateksu.

Przeznaczenie



Majtki chłonne Seni Active Plus są przeznaczone dla osób ze średnim i ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Polecane są osobom, u których wyciek moczu jest bardzo obfity lub które nie korzystają z toalety, bądź korzystają z niej rzadko.

Sposób użycia

- Załóż majtki chłonne jak zwykłą bieliznę.
- W razie potrzeby, np. jeśli chcesz skorzystać z toalety, możesz je zdejmować i ponownie zakładać jak zwykłą bieliznę.
- Pamiętaj: aby zdjąć zużyte majtki chłonne rozerwij szwy boczne z obu stron majtek.
- Zwiń zużyte majtki chłonne i wyrzuć je do kosza na śmieci.
- Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.

Uwagi

Testowane dermatologicznie.

Producent

TZMO-SENI
Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
tzmo@tzmo-global.com