

Seni Kids, pieluchomajtki, Junior Extra (15+ kg), 30 sztuk



Cena: 43,64 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	SENI
Opakowanie	30 sztuk
Postać	pielucha
Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dziecka

Opis produktu

Opis

Seni Kids Junior (15+ kg) to pieluchomajtki medyczne dla dzieci z problemem nietrzymania moczu, które wyrosły z klasycznych pieluszek, ale nadal potrzebują komfortowego i pewnego zabezpieczenia. Mają elastyczne panele boczne dla komfortu i swobody ruchu. Specjalna włóknina rozpraszająca wilgoć oraz gęstszy wkład chłonny zapewniają uczucie suchości. Pieluchomajtki są wyposażone w indykator wilgotności, który sygnalizuje, kiedy należy je zmienić.

Wskazania

Pieluchomajtki dla dzieci z nietrzymaniem moczu, których obwód w pasie mieści się w przedziale 38-55 cm.

Działanie

Specjalna włóknina dystrybucyjna w połączeniu ze wkładem chłonnym sprawiają, że produkt jest w stanie wchłonąć więcej wilgoci i zatrzymać ją wewnątrz wkładu, z dala od skóry. Oddychający laminat wykorzystany jako warstwa zewnętrzna produktu pozwala na swobodny dostęp powietrza do skóry, jak również reguluje temperaturę wewnątrz pieluchy, co zmniejsza ryzyko powstania odleżyn i odparzeń. Elastyczne elementy pozwalają na dopasowanie się wyrobu do kształtu pleców oraz brzucha dziecka, a dodatkowe osłonki boczne chronią przed wyciekami i zatrzymują moczu wewnątrz pieluchy.

Specjalne mikrogranulki wykorzystane we wkładzie chłonnym zwiększają jego zdolność absorbowania płynów i neutralizują nieprzyjemny zapachu moczu.

Wskaźnik wilgotności umieszczony na zewnętrznej stronie pieluchomajtek powiadamia o stopniu napełnienia pieluchy oraz sugeruje konieczności jej zmiany.

Sposób użycia

Przed zastosowaniem pieluchomajtki należy aktywować, dzięki czemu będą one bardziej miękkie, a wkład bardziej chłonny.

- Rozłóż pieluchomajtki, złap je za dwa końce, następnie lekko pociągnij.
- Złóż pieluchomajtki wzdłuż na pół i delikatnie rozciągnij.
- Stań z brzegu łóżka i zegnij w kolanie jedną z nóg dziecka. Obróć dziecko na bok i po dokonaniu czynności pielęgnacyjnych



podłóż z tyłu pod dziecko aktywowane wcześniej pieluchomajtki. Połóż dziecko z powrotem na plecach, wyprostuj jego nogi, a następnie wyciągnij podwinęte skrzydło pieluchomajtek.

- Wyciągnij przednią część pieluchomajtek i dopasuj ją do krocza.
- Zapnij pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia. Przyczep je lekko skośnie do góry. Górne przylepcorzepty przyklej dopasowując pieluchomajtki do talii.
- Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i odpowiednio przylega do ciała oraz czy osłonki boczne nie są zwinięte. Ważne jest aby w żadnym miejscu pielucha nie wpijała się w ciało.
- Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.

Producent

TZMO
Żółkiewskiego 20/26
Toruń