

Seni Lady Slim Mini, wkładki urologiczne, 10 sztuk



Cena: 9,03 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	10 sztuk
Postać	Wkładka urologiczna
Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Seni Lady Slim to wyrób medyczny w postaci wkładek urologicznych, zaprojektowany dla kobiet zmagających się z nietrzymaniem moczu w postaci kropelkowej. Produkt jest cienki, dobrze wentylowany i dostosowuje się do kształtu ciała. Klasa chłonności wynosi 2/6 kropelek.

Sposób użycia

- Wyjąć wkładkę z opakowania i oderwać papier z paska klejowego, umieszczony na jej spodzie.
- Przykleić wkładkę do bielizny.
- Sprawdzić czy wkładka jest przyklejona prosto.
- Zużytą wkładkę zwinąć i wyrzucić do kosza na śmieci. Nie wyrzucać zużytej wkładki do toalety.

Właściwości

W każdej wkładce Seni Lady wilgoć rozprowadzana jest po całym wkładzie chłonnym. Jest to możliwe dzięki włókninie rozprowadzającej EDS. Wchłanianie zachodzi szybko, a wilgoć nie wraca, nawet pod naciskiem, więc powierzchnia wkładki pozostaje sucha. Dzięki swej wysokiej chłonności produkt pozwala na zachowanie świeżości i suchości przez wiele godzin. Wkładki są wyposażone w specjalny superabsorbent Odour Stop, który zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Anatomiczny kształt wyrobu umożliwia dopasowanie wkładki do kształtu ciała, nawet jeżeli dojdzie do jej zawilgocenia. Potrójny pasek kleju umożliwia pewne mocowanie do bielizny; z kolei tłoczenie znajdujące się na środku wkładu chłonnego wspomaga szybką dystrybucję wilgoci. Materiał znajdujący się we wkładzie chłonnym pozwala na szybkie i dokładne rozprowadzanie wilgoci. Dzięki wykorzystaniu w produkcji wkładek specjalnej struktury warstwy zewnętrznej możliwa jest swobodna cyrkulacja powietrza, przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu wilgoci. Pozwala to na oddychanie skórze. Oddychalność ta sprawia, że powstaje mniej podrażnień. Brak zawartości lateksu zmniejsza ryzyko wystąpienia nieprawidłowych reakcji alergicznych.

Uwagi

- Produkt jednorazowego użytku.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Nie wyrzucać do toalety.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

TZMO-SENI
Żółkiewskiego 20/26
Toruń