

# Seni Super Plus Medium Pieluchomajtki dla dorosłych 30 sztuk

Cena: 79,53 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 szt.
Postać	Pieluchomajtki
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Super Seni Plus** to pieluchomajtki dla dorosłych zapinane na rzepy, które są polecane zarówno dla osób aktywnych, jak i osób o ograniczonej mobilności.

Pieluchomajtki posiadają boczne osłonki wykonane z hydrofobowej włókniiny, które zatrzymują wilgoć wewnątrz produktu, zapewniając komfort i uczucie suchości. Struktura warstwy zewnętrznej została specjalnie zaprojektowana tak, aby nie przepuszczać cieczy, jednocześnie umożliwiając przepływ powietrza. Dzięki temu skóra może swobodnie oddychać, co minimalizuje ryzyko podrażnień, odparzeń i odleżyn.

### Zastosowanie

Pieluchomajtki Super Seni Plus są odpowiednie dla osób dorosłych z inkontynencją moczową lub kałową o średnim i ciężkim stopniu. Mogą być stosowane zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn.

Pieluchomajtki są przeznaczone dla osób aktywnych, które są w stanie samodzielnie korzystać z produktu, jak również dla osób leżących, które wymagają opieki. Dzięki elastycznemu systemowi zapinania na rzepy, pieluchomajtki można łatwo dopasować do ciała, zapewniając komfort i ochronę przez cały dzień lub noc.

### Sposób użycia

- Pieluchomajtki możesz zakładać na stojąco lub na leżąco.
- Przed założeniem pieluchy aktywuj ją w 2 prostych krokach by chłonność wyrobu została maksymalnie wykorzystana:
- Rozłóż pieluchę, chwyć ją za dwa końce i lekko pociągnij.
- Złóż pieluchę wzdłuż na pół.
- Nie skręcaj pieluchomajtek.

### Dodatkowe informacje



- Nie wyrzucać pieluchomajtek do toalety.
- Dobierz rozmiar pieluchomajtek mierząc obwód w biodrach i w talii używając miary krawieckiej.
- Wybór odpowiedniego rozmiaru pieluchomajtek jest bardzo ważny, ponieważ od tego zależy komfort osoby, która z nich korzysta oraz ilość pracy dla opiekuna.
- Dobrze dobrany produkt zmniejsza ryzyko powstania odleżyn.