

Sikatrís, silikonowe plastry na blizny, 5 cm x 30 cm, 5 sztuk

Cena: 115,70 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SIKATRIS
Opakowanie	5 sztuk
Postać	Plastry
Producent	BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające, Ochronne, Redukcja blizn, Regenerujące (odbudowujące), Rozjaśniające, Wygładzające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Plastry na blizny **Sikatrís** to innowacyjny i skuteczny produkt przeznaczony do profilaktyki oraz pielęgnacji różnych rodzajów blizn, takich jak te po cesarskim cięciu, operacjach kardiologicznych i abdominoplastyce. Wyrób medyczny opiera swoje działanie na unikalnych właściwościach żelu silikonowego. Plastry Sikatrís skutecznie poprawiają wygląd zarówno świeżych, jak i starych blizn.

Zastosowanie

Sikatrís, silikonowe plastry na blizny, 5 cm x 30 cm, 5 sztuk przeznaczone są do:

- profilaktyki i pielęgnacji różnego rodzaju blizn: po cesarskim cięciu, operacjach kardiologicznych, abdominoplastyce, oparzeniach.
- poprawa wyglądu zarówno świeżych, jak i starych blizn.

Sposób użycia

Jak naklejać silikonowe plastry na blizny Sikatrís?

- Przed użyciem dokładnie umyć ręce oraz bliznę i otaczającą skórę.
- Ostrożnie osuszyć bliznę.
- Wyjąć plaster z opakowania.
- W razie konieczności przyciąć plaster do rozmiaru blizny zostawiając niewielki naddatek (przynajmniej 0,5 cm z każdej strony blizny).
- Ostrożnie usunąć folię ochronną z plastra.
- Delikatnie przyłożyć stroną samoprzylepną, zaczynając od brzegu blizny.
- Dokleić do całej powierzchni blizny.
- Zaleca się raz dziennie zdjąć plaster, bliznę oczyścić neutralnym mydłem oraz osuszyć.



- Plastry silikonowe na blizny należy zmieniać co 3-5 dni, kiedy utraci właściwości przylegające do skóry.
- Najlepsze efekty można uzyskać przy wymianie plastra co 24 godziny.

Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku stwierdzenia alergii na silikon.
- Nie stosować na rany otwarte, które nie są jeszcze całkowicie wyleczone, rany sączące, oparzenia, błony śluzowe, a także w przypadku chorób dermatologicznych uniemożliwiających stosowanie wyrobów na bazie silikonu.

Ważne wskazówki

- Chronić przed źródłami ciepła.
- Nie stosować powtórnie.

Producent

Biovena Healt Sp. z o.o.
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa