

SIKATRIS Silikonowy plaster na blizny 5cm

Cena: 27,45 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Plastry
Producent	BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Redukcja blizn, Regenerujące (odbudowujące), Rozjaśniające, Wygładzające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Plastry Sikatris, oparte na wyjątkowych właściwościach żelu silikonowego, reprezentują nowatorskie i efektywne podejście do profilaktyki oraz pielęgnacji różnych rodzajów blizn.

Zastosowanie

Profilaktyka i pielęgnacji różnego rodzaju blizn: po cesarskim cięciu, operacjach kardiologicznych, abdominoplastyce, oparzeniach.

Sposób użycia

Przed użyciem dokładnie umyć ręce. Delikatnie umyć mydłem bliznę i otaczającą skórę, spłukać ciepłą wodą. Ostrożnie osuszyć bliznę. Wyjąć plaster z opakowania. W razie konieczności przyciąć plaster do rozmiaru blizny zostawiając niewielki naddatek (przynajmniej 0,5cm z każdej strony blizny). Ostrożnie usunąć folię ochronną z plastra. Delikatnie przyłożyć stroną samoprzylepną, zaczynając od brzegu blizny. Dokleić do całej powierzchni blizny. Zaleca się raz dziennie zdjąć plaster, bliznę oczyścić neutralnym mydłem oraz osuszyć. Plastry silikonowe na blizny należy zmieniać co 3-5 dni, kiedy utraci właściwości przylegające do skóry, jednak najlepsze efekty można uzyskać przy wymianie plastra co 24 godziny.

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku stwierdzenia alergii na silikon. Nie stosować na rany otwarte, które nie są jeszcze całkowicie wyleczone, rany sączące, oparzenia, błony śluzowe, a także w przypadku chorób dermatologicznych uniemożliwiających stosowanie wyrobów na bazie silikonu.

Ważne wskazówki

- Chronić przed źródłami ciepła.
- Nie stosować powtórnie.
- Nie używać tego samego plastra dłużej niż 7 dni.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Dodatkowe informacje

1 plaster 5cm x 30 cm.

Producent

Biovena Healt Sp. z o.o.,
ul. Odrowęża 15,
03-310 Warszawa.